

NÁVOD K POUŽITÍ

FRANCOUZSKÉ PŘEDLOKETNÍ BERLE

222



CE

POUŽITÍ

Berle je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Berle je určena pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

POPIS

Konstrukce berle je vyrobena z duralových trubek vysoké pevnosti, doplněna otevřenou opěrkou předloktí a pohodlným ergonomickým plastovým (222 KL, KL-C), vyměkčeným (222 KL-S, KL-SC) nebo vyměkčeným anatomickým držadlem (222 KL-AS, KL-ASC). Vyměkčené držadla jsou vyměnitelné a plastové jsou doplněny bezpečnostní odrazkou. Berle jsou výškově nastavitelné a ve spodní části jsou opatřeny maticí tlumící klapání berle a pryžovým protiskluzovým nástavcem. Berle se dělají v různém barevném provedení plastových a gumových částí (viz aktuální katalog). U provedení 222 KL-C, KL-SC a KL-ASC je možné navíc vybírat z různých barev trubky.

TECHNICKÉ PARAMETRY

typ berle	celková výška (cm)	od držadla k zemi (cm)	od držadla k opěrce (cm)	průměr opěrky (cm)	hmotnost (kg)	nosnost (kg)	protiskluzový nástavec (typ, průměr)
222 KL, KL-C	99-119	76-96	23	9	0,60	130	100 CTB/C (16 mm)
222 KL-S, KL-SC	99-119	76-96	23	9	0,60	130	100 CTB/C (16 mm)
222 KL-AS, KL-ASC	99-119	76-96	23	9	0,60	130	100 CTB/C (16 mm)

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním berle si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním berle konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Berli nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost (viz tabulka).

Při nastavování výšky madla nebo předloketní opěrky postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi ve vlhkém prostředí, hrozí nebezpečí úrazu.

Při chůzi s berlí vždy použijte vhodnou obuv s pevnou patou.


OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části berle, tj. berli s držadlem, maticí tlumící klapání, opěrkou předloktí a protiskluzovým pryžovým nástavcem.


NASTAVENÍ VÝŠKY DRŽADLA

Pro nastavení výšky držadla povolte matici tlumící klapání berle (A), vytáhněte aretační „E“ pojistku (B), tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy a tím i výšku držadla, pojistku zasuněte zpět a matici dotáhněte, čímž zároveň maximálně omezíte případné klapání berle.

Optimální nastavení berle vždy konzultujte s vaším ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem.

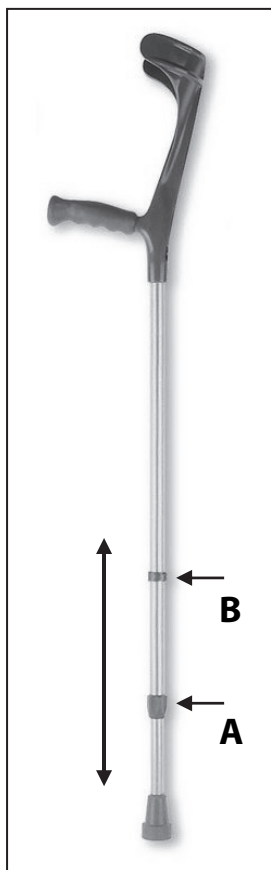

Umístění
aretačních
pojistek

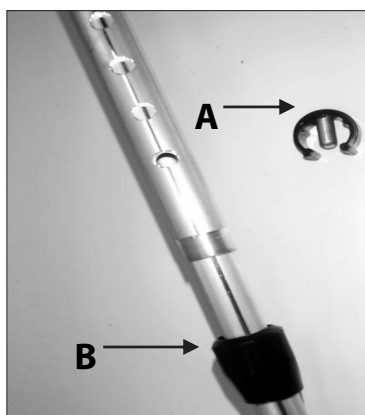

„E“ pojistka, matice tlumící klapání
berle a pojistka opěrky

ÚDRŽBA

Berli lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebovaný pryžový nástavec (viz tabulka).

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.