

NÁVOD K POUŽITÍ

CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ

102



CE

POUŽITÍ

Chodítka je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítka je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci. Je vhodné též pro transport drobných předmětů.

POPIS

Skládací rám chodítka je vyroben z odlehčených, povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn čtyřmi plnými kolečky, z nichž přední dvě mají uložení v otočné vidlici a mají větší průměr, a pohodlnými ergonomickými výškově nastavitelnými rukojetmi. Chodítka je vybaveno bovdenovými brzdami s možností aretace, sedátkem, zádovou opěrkou, nákupní taškou a aretační pojistkou při složení. Model **102 CARBON** je oproti základnímu provedení **102** vyroben z odlehčených carbonových trubek a model **102 OFFROAD** je vybaven většími koly do terénu.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Označení chodítka	 výška chodítka (cm)	 šířka chodítka (cm)	 hloubka chodítka (cm)	 výška sedátka (cm)	 rozměry sedátka (cm)	 hmotnost chodítka (kg)	 nosnost chodítka (kg)	 průměr koleček (cm)
102	86–96	58	70	54	45×22	8,2	136	24/20
102 OFFROAD	88–101	58	76	56,5	45×22	8,2	136	30
102 CARBON	83–93	60	70	52,4	45×22	5,2	136	24/20

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním chodítka si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při transportu (automobilem nebo autobusem) nepoužívejte chodítko k sezení.

Chodítko ani tašku nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 136 kg, resp. 5 kg.

Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Je-li chodítko v klidu, vždy zaaretujte brzdy.

Při užívání chodítka musí být všechny kola v kontaktu s podkladem.


Chodítko není určeno pro transport sedících uživatelů.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. chodítko s madly, nákupní košík a opěrku zad.

NASTAVENÍ VÝŠKY MADEL A ZÁDOVÉ OPĚRKY

Zmáčkněte pojistku (A) a nastavte požadovanou výšku obou madel. Tuto pozici zajistěte uvolněním pojistky. Zkontrolujte, zda jste obě madla nastavili do stejné výšky. Madla by měla být nastavena tak, aby při vzpřímeném stoji uživatele, byla zachována mírná fyziologická flexe v loketním kloubu, tj. stav, když se horní končetiny přirozeně uvolní: Loket by neměl být úplně propnutý ani příliš pokrčený. Nemělo by docházet k hrbení ani přílišnému vytažení ramen a lopatek. Optimální nastavení výšky madel vždy konzultujte s vaším ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem.

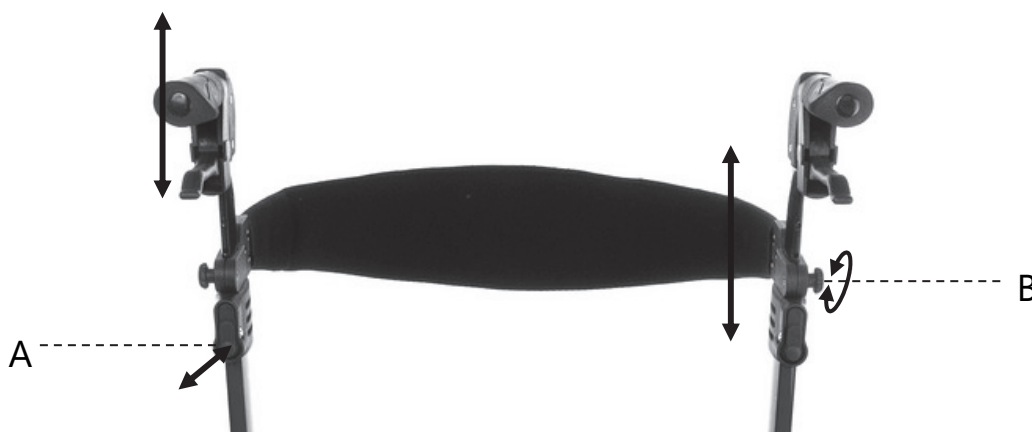

Povolte oba šrouby (**B**) proti směru hodinových ručiček a nastavte požadovanou výšku zádové opěrky. Zvolenou pozici zajistěte utažením šroubu po směru hodinových ručiček. Pro úplné odstranění opěrky zad šrouby zcela vyšroubujte a sundejte plastové objímky z eliptických trubek výsuvných madel.


BRZDY

Před každým použitím vyzkoušejte správnou funkci brzd. Při stlačení páky brzdy (**C**) směrem nahoru by chodítko mělo přibrzdit až úplně zastavit. Stlačením páky brzdy směrem dolů, by se měly brzdy zaaretovat. Opačným postupem brzdy odblokujete. Vždy používejte obě brzdy současně!

Varování: Během chůze mějte obě ruce vždy připraveny na páčkách k možnosti okamžitému zabrždění v případě potřeby!!!



Kolečka by se měla volně otáčet a nedrhnout a při úplném zabrždění se neprotáčet. Pokud tomu tak není, seřídte brzdy pomocí šroubů bovdenového lanka (**D**).

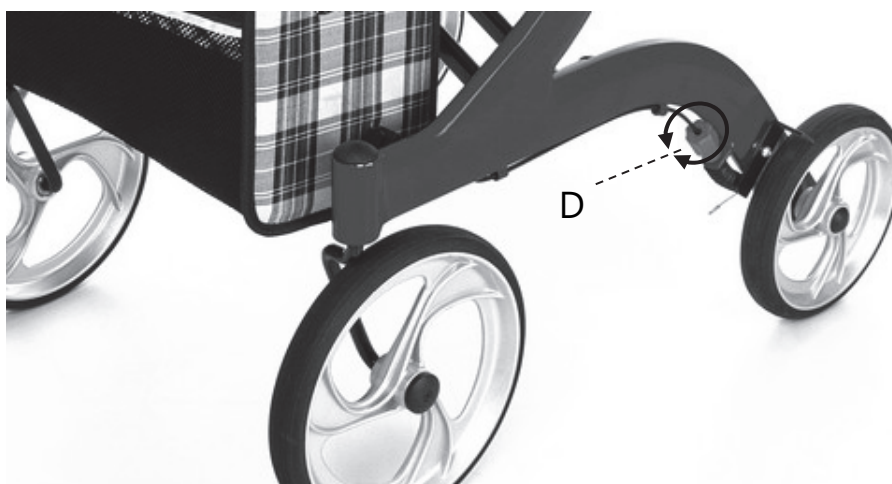

TRANSPOTNÍ A SKLADOVACÍ POLOHA

Vytažením madla (E) směrem nahoru lze chodítko jednoduše složit do transportní polohy. Proti nechtěnému rozložení chodítka zajistěte rám zacvaknutím pojistky (F). Při rozkládání postupujte opačným způsobem.



ÚDRŽBA

Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav koleček a pro plynulé a bezhlučné ovládání bovdenových brzd pravidelně promazat ovládací lanka, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.