



Návod k použití

Sprchovací a toaletní vozík

	Denver	Chicago
REF	360.XX.YY	358.XX.YY
	175 kg	200 kg
	Atlanta	Dallas
REF	361.XX.YY	359.XX.YY
	175 kg	200 kg

XX= Kód barvy, YY= Varianta výbavy




**Obsah**

Sprchovací a toaletní vozíky.....	1	11.10 Odstranění příčné vzpěry.....	8
1 Popis	3	12 Řešení problémů.....	8
1.1 Úvod	3	13 Péče a údržba	8
2 Funkce	3	13.1 Čištění a péče	8
2.1 Zamýšlené použití	3	13.2 Údržba	8
2.2 Podmínky použití	3	14 Náhradní díly & příslušenství	10
2.3 Skladování & přeprava.....	3	15 Náčrt & rozměry	11
2.4 Výbava & funkce	4		
2.5 Balení	4		
2.6 Likvidace	4		
3 Symboly & štítky	4		
4 Bezpečnostní pokyny.....	4		
5 Hlášení incidentů	5		
6 Záruka.....	5		
6.1 Reklamace.....	5		
7 Opětovné použití životnost.....	5		
8 Rozsah dodávky.....	6		
9 Nastavení pro použití	6		
9.1 Sklopení stupaček	6		
9.2 Nastavení výšky stupačky	6		
9.3 Sestavení opěrky zad	6		
10 Údaje o výrobku	6		
11 Použití výrobku	6		
11.1 Posazení	7		
11.2 Vstávání	7		
11.3 Odklopení područek	7		
11.4 Odejmutí stupaček	7		
11.5 Odejmutí sprchov./toalet.sedáku	7		
11.6 Manipulace s toaletní nádobou	8		
11.7 Odejmutí PUR zádové opěrky	8		
11.8 Parkovací brzdy	8		
11.9 Nasunutí nad běžnou toaletu.....	8		

1 Popis

Popis obrázku:

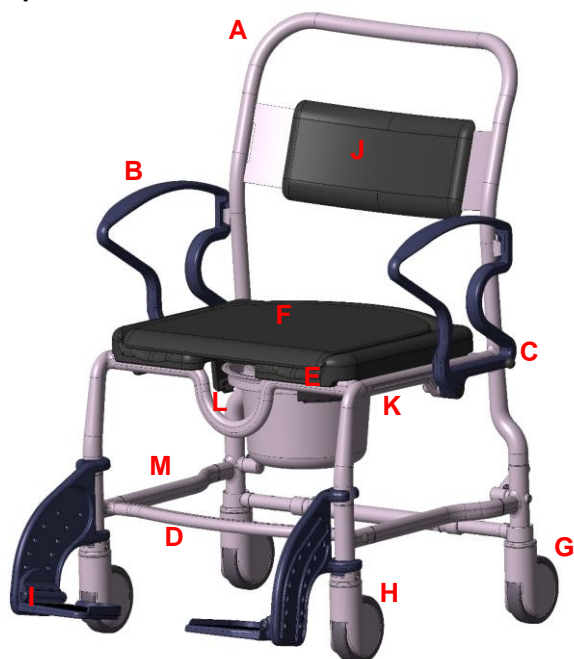

A	Zádová opěrka
B	Područky (odklopitelné)
C	Aretační kolík
D	Rám vozíku
E	PUR sedák, hygienický otvor
F	PUR kryt (odnímatelný)
G	Kola s parkovací brzdou
H	Kola bez parkovací brzdy
I	Stupačka s nášlapnou plochou (nastavitelná)
J	PUR zádová opěrka
K	Držák toaletní nádoby
L	Toaletní nádoba s víkem
M	Typový štítek

1.1 Úvod

- Zde popsaný výrobek je zdravotnický prostředek rizikové třídy I podle (EU) 2017/745 MDR.
- V tomto návodu k použití naleznete informace o bezpečné a správné instalaci, o používání, provozu, údržbě a péči o tento výrobek.
- Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tento návod k použití. Dbejte zejména bezpečnostních pokynů a postupujte podle nich.

2 Funkce

2.1 Zamýšlené použití

Denver, Atlanta, Chicago, Dallas

- Výrobek je určen pro péči o pacienty s omezenou schopností stát a/nebo chodit. Umožňuje sprchování vsedě a použití toalety, i když je běžná toaleta nebo koupelna mimo dosah. Pacient musí být schopen sedu a mít dostatečné osvalení horní části těla. Je-li to nutné, musí být při použití přítomna zdravotní sestra. Výrobek není určen k dlouhodobému sezení a přesunům.

Specifikace – Denver, Atlanta:

- Maximální nosnost: 175 kg
- Výškově stavitelné stupačky
- Vozík, 2 otočná kolečka, brzdy
- Použití v interiéru

Specification – Chicago, Dallas:

- Maximální nosnost: 200 kg
- Výškově stavitelné stupačky
- Vozík, 2 otočná kolečka, brzdy
- Použití v interiéru

Indikace

- Zdravotní stav pacienta:
- O použití vozíku pacienty s kognitivními poruchami (snížené mentální, fyzické, smyslové nebo intelektové schopnosti) musí předem rozhodnout lékař (předepsání výrobku) nebo ošetřující personál na místě.

2.2 Podmínky použití

- Teplotní rozsah: 5°C až 35°C; je třeba zabránit přímému působení tepla na výrobek.
- Relativní vlhkost: 40% -75%. Mimo tyto podmínky smí být výrobek používán pouze krátkodobě.
- Tento výrobek nelze používat k přepravě těžkých předmětů.
- Vozík není vhodný pro dlouhodobé sezení.
- Pro umístění vozíku musí být dostatečně velký rovný povrch. Viz 15.
- Výrobky lze nasunout nad běžnou toaletu. Viz 15.
- Použití v domácím prostředí a lůžkových zařízeních.

2.3 Skladování & přeprava

- Teplotní rozsah: 5°C až 35°C; je třeba zabránit přímému působení tepla na výrobek.
- Výrobek skladujte v suchých místnostech s vlhkostí do 65 %.

- Sprcha by měla být navržena tak, aby zde byla dostatečně velká rovná plocha.

2.4 Výbava & funkce

- Vozík se skládá z plastového rámu s trubkovou vložkou a otočných koleček (s parkovací brzdou vzadu).
- Područky lze otočit. Stupačky jsou výškově nastavitelné; lze sundat nebo odklopit. Vozík lze nasunout nad standardní WC mísu.


2.5 Balení

- Doporučujeme uschovat obal pro pozdější přepravu.
- Rozměry - Denver, Chicago: 770mm x 640mm x 720mm
- Rozměry - Atlanta, Dallas: 780mm x 640mm x 720mm

2.6 Likvidace

- Likvidace a recyklace použitých výrobků a obalů musí být prováděna v souladu s aktuálně platnými předpisy. Další informace vám poskytne společnost zabývající se likvidací odpadu.
- Dodržujte pokyny k ochraně před infekcemi.
- Věnujte prosím pozornost všem štítkům a informacím na obalu a jednejte podle nich.

3 Symboly & štítky

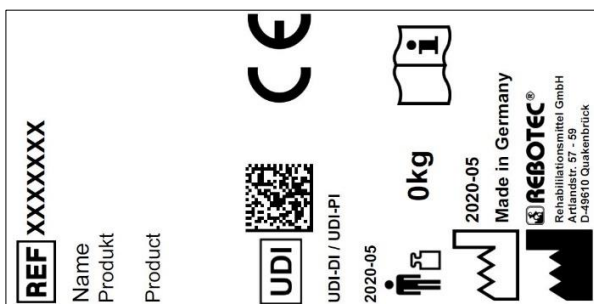

Ukázkový štítek.



Štítek nesmí být odstraněn!

Pro objednání náhradních dílů a vyřízení reklamací bude vyžadován název výrobku, výrobní číslo a rok výroby.

Symbol	Význam	Symbol	Význam
	Přečtěte si návod k použití		Rok výroby zařízení
SN	Výrobní číslo		Důležité informace!

Symbol	Význam	Symbol	Význam
REF	Číslo výrobku		Maximální nosnost v kg
	Pokyny pro péči		Pokyny k údržbě
	Pouze pro použití v interiéru		Výrobce
	Vizuální signál	EN	Jazyk
	Přečtěte si návod k použití		Nelikvidujte s komunálním odpadem
CE	Výrobek je v souladu s (EU) 2017/745 MDR		
	Pozor! Dodržujte bezpečnostní pokyny		
UDI	Jedinečná identifikace zařízení (Údaje: GTIN / LOT (SN) / rok výroby)		
MD	Štítek zdravotnického prostředku Výrobek je zdravotnický prostředek.		

4 Bezpečnostní pokyny



Dodržujte prosím následující bezpečnostní pokyny:

- Před prvním použitím výrobku je nutné si přečíst celý návod k použití, aby se předešlo nebezpečí nebo škodám způsobeným nesprávnou obsluhou.
- Před každým použitím zkontrolujte výrobek, zda není viditelně poškozený nebo neúplný.
- V případě poruchy nebo poškození jakéhokoli druhu se výrobek nesmí používat.

Pozor: Nebezpečí pádu!

- Pokud je vozík používán pacientem musí být vždy zajištěné područky.
- Posazení, vstávání a přemístění pacienta by mělo být prováděno pod dohledem nebo s pomocí vyškoleného ošetřovatele v závislosti na zdravotním stavu pacienta.
- Pacienti, kteří jsou náchylní k nekontrolovaným akcím nebo pohybům, musí být při používání vozíku pod dohledem.
- Vozík smí být přemísťován ve svahu **pouze** s pomocí pečovatele. Obecně platí, že do svahu by měl být vozík tlačěn dopředu a ze svahu by měl být tažen pozadu.

Pozor: Nebezpečí sklouznutí!

- Před použitím zkontrolujte, zda je plocha sedačky pevně připojena k rámu sedačky.
- Před použitím vozíku vždy zajistěte parkovací brzdy, aby vozík neodjel.
- Při posazování nesedejte na přední hranu sedačky nebo sedáku; uživatel by měl zabírat celou plochu sedačky.

Pozor: Nebezpečí převrácení!

- Vozík je možné tlačit pouze za madlo (zádová opěrka).
- Před posazením / vstáváním musí být stupačky odklopené nebo otočené. Nestoupejte na stupačky!
- **Nenajíždějte** s vozíkem na prahy dveří, hrany nebo jiné nerovné povrchy.
- Výrobek používejte **pouze** ve vnitřních prostorách a na rovných, neklouzavých površích.
- Vozík tlačte **pouze** mírným tempem chůze (s pacienty i bez nich).
- Nevyklánějte se z vozíku (jak v klidu, tak za pohybu). Pokud jsou otočná kolečka v nepříznivé poloze (směřují dovnitř), je stabilita židle omezena.

Pozor: Nebezpečí poškození!

- Vozík je vhodný pouze pro zamýšlené použití (viz část 2). Dodržujte max. povolenou nosnost (údaj na typovém štítku)!
- Nikdy výrobek nepřenášejte ani nezvedejte, pokud na něm pacient sedí.
- Netahejte ani nedržte za dodatečně připojené součásti nebo příslušenství.

Pozor: Nebezpečí skřípnutí nebo zachycení!

- Při sklápění nebo odklápění područek nesahejte do vedení kloubu, aby nedošlo k zachycení částí těla nebo jiných předmětů.
- Při připevňování sedáku nesahejte mezi povrch a rám sedáku, aby nedošlo k zachycení částí těla.
- Při sklápění stupaček dbejte na to, aby nedošlo k zachycení či skřípnutí částí těla.
- Při vytahování a vkládání toaletní nádoby hrozí zachycení měkké tkáně pacienta. Aby se předešlo zraněním, může být nádoba vytahována nebo zasouvána pouze tehdy, když na vozíku nesedí uživatel.

Pozor: Nebezpečí zranění!

- Při povrchové teplotě > 40 °C hrozí nebezpečí poranění. Nevystavujte proto výrobek vysokým

teplotám (např. sluneč. záření, radiátorům, horké vodě). Před použitím nechte výrobek vychladnout.

i Pokud výrobek používají pacienti s necitlivou pokožkou (bez vnímání teploty nebo poškození kůže), musí ošetřující personál provést tepelnou kontrolu (např. dotyk hřbetem ruky).

5 Hlášení incidentů

- Vážné incidenty v souvislosti s výrobkem musí být okamžitě hlášeny výrobcí a BfArM.

o BfArM: www.bfarm.de/DE

- Používejte funkce hlášení a uvedené formuláře.

o Výrobce: pms@rebotec.de

6 Záruka

- Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku 24 měsíců. Předpokladem je dodržování VOP (www.rebotec.de/agbs), jakož i zamýšleného použití. Platí zákonná ustanovení o záruce.
- Neoprávněné úpravy tohoto výrobku ruší shodu výrobku a záruku.

6.1 Reklamace

- Před vrácením výrobku nás, prosím, kontaktujte.
- Abyste předešli poškození při přepravě, používejte pokud možno originální obal.
- Dodržujte pokyny k ochraně před infekcemi.
- Ujistěte se, prosím, že výrobek při vrácení nepředstavuje riziko infekce.
- K výrobku přiložte bezpečnostní list.
- V případě vrácení zboží, které není označeno jako nezávadné, mohou vzniknout náklady.

7 Opětovné použití, životnost

- Výrobek je vhodný pro opakované použití. Jak často lze výrobek znovu použít, závisí na frekvenci a povaze používání.

- Před opětovným použitím musí být výrobek hygienicky vyčištěn a musí být zkontrolována, a v případě potřeby obnovena, technická a funkční bezpečnost a spolehlivost výrobku. Viz 13.
- Podrobnější informace naleznete v pokynech pro repasování (02.12.156) a v pokynech pro údržbu (02.11.150).
- Dokumenty lze stáhnout z následujícího odkazu:
 - www.rebotec.de/downloads
- Pokud je výrobek používán k určenému účelu, je jeho životnost 5 let. Efektivní životnost se může lišit v závislosti na frekvenci a intenzitě používání a na celkovém stavu.

8 Rozsah dodávky

- 1x sprchovací / toaletní vozík
- 1x návod k použití (02.07.080)

Pokyny pro repasování a údržbu lze objednat nebo zobrazit a stáhnout na adrese www.rebotec.de/downloads.

9 Nastavení pro použití

- Výrobek byl ve výrobě pečlivě zkontrolován, zda není vadný a zda je kompletní. Při převzetí prosím zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje případné poškození, ke kterému mohlo dojít během přepravy, a úplnost rozsahu dodávky. Montáž nebo seřízení musí provést odborný prodejce.

9.1 Sklopení stupaček

- Otočte (1) stupačky dopředu, dokud se automat. nezajistí. Sklopte (2) nášlapnou plochu stupačky,




v případě potřeby upravte výšku stupaček.

9.2 Nastavení výšky stupačky

- Výšku nášlapné plochy stupačky lze nastavit do 7 poloh. Povolte a vyjměte šrouby na boku stupačky pomocí imbusového klíče (SW 5). Zvolte vhodnou výškovou úroveň (1-7) a přišroubujte nášlapnou plochu zpět na místo. Ujistěte se, že jsou šrouby pevně utaženy!

9.3 Sestavení opěrky zad

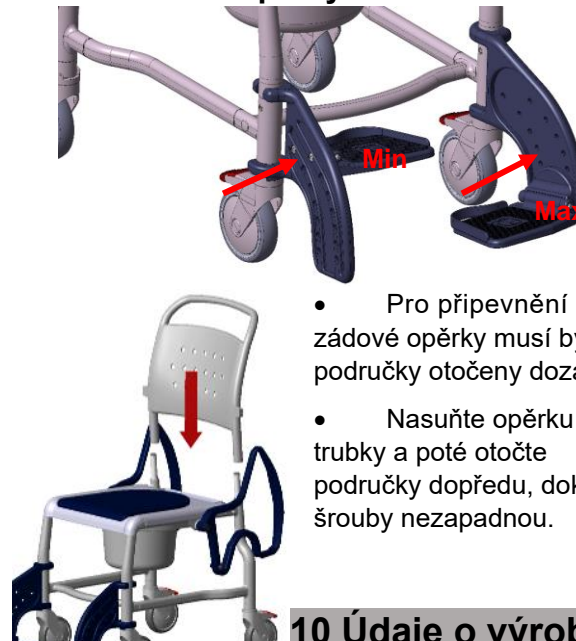

- Pro připevnění zádové opěrky musí být područky otočeny dozadu.
- Nasuňte opěrku na trubky a poté otočte područky dopředu, dokud šrouby nezapadnou.

10 Údaje o výrobku

- Vyhrazujeme si právo na technický vývoj a vylepšení s ohledem na konstrukci zobrazenou v tomto návodu k použití. Viz 15.

Vlastnost		Hodnota
Denver		
2.	Hmotnost výrobku*	19.8 kg
3.	Celková hmotnost*	23.4 kg
Atlanta		
2.	Hmotnost výrobku*	20.6 kg
3.	Celková hmotnost*	23.8 kg
Chicago		
2.	Hmotnost výrobku*	20.5 kg
3.	Celková hmotnost*	24.1 kg
Dallas		
2.	Hmotnost výrobku*	21.3 kg
3.	Celková hmotnost*	24.5 kg
Kompatibilita s pokožkou		DIN EN 10993-1/-5
Hořlavost**		DIN EN 1021-1/-2

*Bez příslušenství

11 Použití výrobku

- Před použitím je třeba se ujistit, že je výrobek v řádném stavu. Pokud jsou zjevné závady nebo poruchy, výrobek nesmí být používán. Závady nechte opravit u specializovaného prodejce.



Je-li to třeba, v závislosti na omezeních pacienta (přiměřená pohyblivost a svalová síla), je nutná přítomnost pečovatele během usazování a vstávání pacienta. Následná nastavení smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

11.1 Posazení

- Před posazením a postavením se ujistěte, že je vozík bezpečně umístěn, aby se nemohl posunout nebo převrátit, že jsou zabrzděna alespoň dvě kola, že jsou područky správně zajištěny, že sedací plochy jsou pevně na svém místě, a že jsou stupačky odklopené do strany nebo nahoru.



- Při posazování musí být uživatel co nejbližší u vozíku. Poté by se měl opřít o obě područky a pomalu se posadit na sedák.

- Pokud to není možné z důvodu fyzického omezení uživatele, musí mu poskytnout podporu ošetřující personál. V případě potřeby se doporučuje použít pomůcky pro zvedání nebo zvedák.



Pozor: Nebezpečí pádu!



- Je třeba se vyvarovat pádu nebo prudkému usazení na sedák vozíku. Pacient by měl sedět pokud možno na celé ploše sedáku, nikoli pouze na jeho okraji.

- Při přepravě osob je třeba využít, pokud možno, celou plochu zádové opěrky a stupaček.

11.2 Vstávání

- Než se postavíte, ujistěte se, že je vozík bezpečně umístěn, aby se nemohl posunout nebo převrátit, že jsou zabrzděna obě dvě kola, že jsou područky správně zajištěny, že sedací plochy jsou pevně na svém místě, a že jsou stupačky odklopené do strany nebo nahoru.
- Pacient se musí na vozíku posunout dopředu tak, aby měl nohy na podlaze.



- Pacient se musí opřít rukama o područky a pomalu se zvedat ze sedáku.

- Pacient se nesmí naklánět příliš dopředu, je zde potenciální riziko pádu.

- Ošetřující personál by měl pacientovi pomoci vstát.



Pozor: Nebezpečí pádu!




- Uživatel nikdy nesmí při posazování se a při vstávání nechat nohy na stupačkách

11.3 Odklopení područek

- Vytažením aretačních kolíků (A) se uvolní zajišťovací mechanismus a područky lze odklopit dozadu.
- Při sklopení područek zkontrolujte, zda jsou západky na opěradle (B) a aretační kolíky (A) správně usazený.

Pozor: Nebezpečí skřípnutí nebo zachycení!

- Područky je třeba otáčet oběma rukama. Chcete-li to provést, držte aretační kolík (A) vytažený během celého procesu otáčení a druhou rukou vedte područku do bodu (C).
- Dotýkejte se pouze vnější části područky a nesahejte na vnitřní část nebo skrz ni.

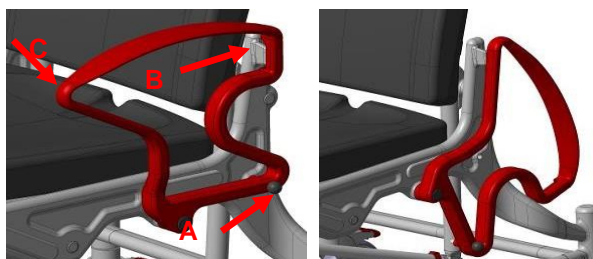

V pravidelných intervalech kontrolujte aretaci, protože případné usazeniny vodního kamene na aretačním mechanismu mohou zhoršit jeho funkci a hladký chod.

11.4 Odejmutí stupaček

- Odejměte nebo sklopte sedák. Poté zvedněte stupačku o cca. 100 mm a otočte ven o 90 st.
- Nyní můžete stupačku zatlačit úplně nahoru a vytáhnout ji.

11.5 Odejmutí sprchov./toalet. sedáku

- Sedák lze za účelem čištění nebo výměny vyjmout z jeho zajištěné polohy na rámu vozíku jeho zvednutím.

11.6 Manipulace s toaletní nádobou

- Zezadu vozíku zasuňte toaletní nádobu pod sedák. Chcete-li nádobu vyjmout, mírně ji nadzvedněte a poté vytáhněte směrem dozadu.

11.7 Odejmutí PUR zádové opěrky

- PUR zádová opěrka je k příčné vzpěře /opěradlu připevněna pomocí výstupků. Zatlačením na výstupky PUR zádovou opěrku uvolníte.

11.8 Parkovací brzdy

- Nohou sešlápněte páku parkovací brzdy. Kolo je nyní zabrzděno. Kolo se uvolní zvednutím páky parkovací brzdy nohou.



11.9 Nasunutí nad běžnou toaletu

- Po odejmutí příčné vzpěry lze vozík přemístit nad WC mísu.




Pozor – bezpečnostní upozornění!


Přeprava pacienta bez namontované vzpěry není z bezpečnostních důvodů povolena. Po použití toalety nezapomeňte vzpěru namontovat zpět!

11.10 Odstranění příčné vzpěry

- Obě zadní kola musí být zabrzděna. Viz 11.8.
- Odstraňte aretační čepy.

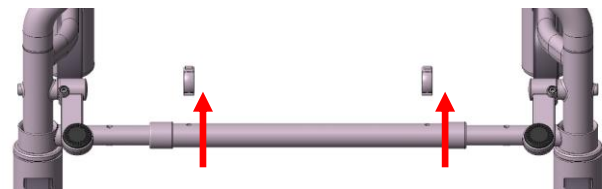

- Zatlačte trubku na stranu a vraťte aretační čepy.

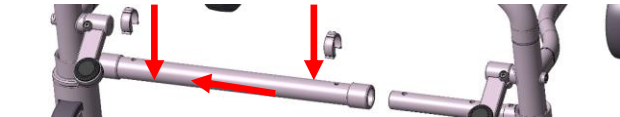

- Nyní lze obě poloviny přetočte dopředu.



- Uvolněte brzdy a posuňte vozík nad toaletu.

- Po použití toalety namontujte příčnou vzpěru zpět v opačném pořadí. Kola musí být zabrzděna. Viz 11.8.

12 Řešení problémů

Chyba	Možná příčina	Řešení
Područky se správně neodklápí	Aretační kolíky jsou znečištěné	Vyčistěte, pravidelně kontrolujte
Aretační kolíky nelze vytáhnout	Znečištění, zaseklá či vadná pružina kolíku	Vyčistěte, vyměňte aretač. kolík
Stupačky nejdou sklopit	Nahromadění nánosů v závěsu	Vyčistěte, zkontrolujte šrouby
Brzda nebrzdí	Obecná závada	Viz sekce Údržba!
Kola se obtížně točí	Nahromadění nánosů	Vyčistěte
Kola se netočí	Obecná závada	Viz sekce Údržba!
Kolo se točí nerovnoměrně	Nerovnoměrné opotřebení	Viz sekce Údržba!
Nestabilní rám vozíku	Šrouby jsou uvolněné	Utáhněte šrouby rámu a kol
Kola jsou ohlá/křivá	Náraz do překážky	Viz sekce Údržba!

13 Péče a údržba

13.1 Čištění a péče



- Výrobek lze čistit jemným konvenčním čisticím a dezinfekčním prostředkem. Po vyčištění otřete výrobek čistým vlhkým hadříkem a poté jej otřete do sucha.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo čisticí prostředky s agresivními přísadami (kyseliny, ředidla), stejně jako tvrdé čisticí předměty (kartáče), mohlo by dojít k poškození povrchů nebo vést ke vzniku nánosů na materiálech.
- Výrobek je vhodný pro ruční čištění a dezinfekci. Dodržujte, prosím, pokyny pro repasování (02.12.156).

13.2 Údržba

- Opotřebení, které není včas rozpoznáno a/nebo nesprávná manipulace, stejně jako nepravdivá nebo žádná údržba může vést k nehodám.

i Z bezpečnostních důvodů musí být výrobek **minimálně jednou ročně odborně udržován.**

- Zkontrolujte výrobek, zda není viditelně poškozen (praskliny, zlomy, uvolněné části)
- Před použitím zkontrolujte stabilitu

Rozsah údržby/kontroly

Údržba by měla zahrnovat následující kontrolní body a měla by být zdokumentována.

- Utažení všech šroubových spojů (zejména kol a rámu)
- Funkce područek a aretačních kolíků
- Funkce stupačky (vyměňte vadné stupačky)
- Jízdní vlastnosti a stopa kol (vyměňte vadná kola)
- Funkce parkovacích brzd (vyměňte vadné brzdy)
- Zkontrolujte příslušenství, zda není poškozené.

Opravy

- Máte-li jakékoli dotazy týkající se údržby vozíku, kontaktujte, prosím, autorizovaného prodejce nebo prodejnu zdravotnických potřeb.
- V případě poškození a / nebo opravy okamžitě kontaktujte svého autorizovaného prodejce.
- Na vozíku **nikdy** neprovádějte **žádné** neautorizované úpravy nebo přestavby. Ty budou mít pouze nepříznivý vliv na bezpečnost a fungování vozíku.
- K opravám používejte pouze originální náhradní díly od výrobce REBOTEC. Respektujte všechny informace o záruce.
- Po provedení údržby nebo opravy doporučujeme výrobek z hygienických důvodů před dalším použitím vyčistit.
- Dodržujte všechny pokyny pro objednávání náhradních dílů, opětovné použití a životnost.

i Pro dokumentaci údržby a oprav poskytuje REBOTEC zprávu o údržbě. Návod k použití a deník údržby si můžete objednat nebo prohlédnout na www.rebotec.de. Informace je také možné vytisknout a v případě potřeby přečíst.

14 Náhradní díly & příslušenství




No.	Art. no.	Designation
1	301.00	Toaletní nádoba s víkem
2	309.10	Držák toaletní nádoby
3	440.10.12	PUR kryt sprchovacího sedáku
4	440.10.22	PUR sprchovací sedák
5a	442.00.87	Páka brzdy, vlevo
5b	442.00.86	Páka brzdy, vpravo
6a	442.00.80	Přední kolo, 125mm, pro Denver / Atlanta
6b	445.00.80	Přední kolo, 125mm, pro Chicago / Dallas
7a	442.00.81	Zadní kolo, 125mm, pro Denver / Atlanta
7b	445.00.81	Zadní kolo, 125mm, pro Chicago / Dallas
8	442.10.85	Záslepka brzdové páky
9	450.10.05	Aretace područky, kompletní
10	447.XX.57	Stupačka kompletní, levá
11	447.XX.59	Stupačka kompletní, pravá
12	445.10.59	PUR zádová opěrka
13	201.00.30	Aretační čep
-	440.10.32	PUR područka
-	440.10.40	PUR ochrana proti protečení moči
-	02.07.080	Návod k použití
-	02.11.150	Deník údržby
-	02.12.156	Pokyny pro repasování

XX= Barevná varianta

K zajištění správné a bezpečné funkce zařízení používejte pouze náhradní díly a příslušenství REBOTEC.

15 Náčrt & rozměry

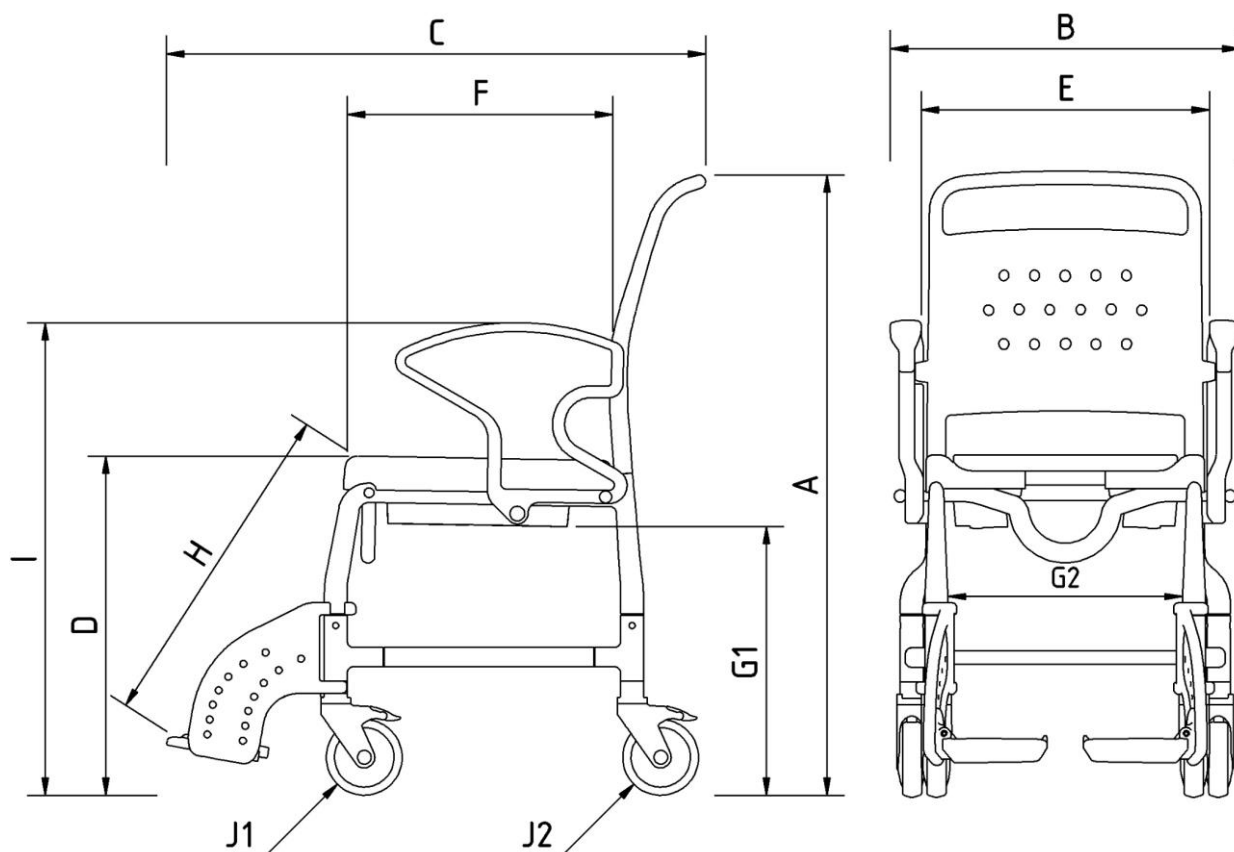

Č.	Označení	Denver	Atlanta	Chicago	Dallas
A	Celková výška	1060 mm	1090 mm	1055 mm	1085 mm
B	Celková šířka	690 mm	750 mm	690 mm	750 mm
C	Celková hloubka	910 mm	870 mm	910 mm	870 mm
D	Výška sedu	570 mm	570 mm	565 mm	565 mm
E	Šířka mezi područkami	590 mm	650 mm	590 mm	650 mm
	Šířka sedu	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
F	Hloubka sedu	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
G1	Výška pro nasunutí nad toaletu	440 mm	440 mm	435 mm	435 mm
G2	Šířka pro nasunutí nad toaletu	490 mm	560 mm	490 mm	560 mm
H	Délka stupačky ke kolenům, max	390 – 550mm	390 – 550mm	390 – 550mm	390 – 550mm
I	Výška područky	785 mm	785 mm	780 mm	780 mm
J1	Průměr předního kola	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
J2	Průměr zadního kola	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm

Rozměry a hmotnosti se mohou lišit v závislosti na vybavení. Mohou existovat drobné odchylky způsobené výrobními tolerancemi. Změny vyhrazeny bez upozornění.

**PRAHA**

Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8

tel./fax: 266 313 652

ortoservis@ortoservis.cz**BRNO**

Minská 100, 616 00 Brno - Žabovřesky

tel./fax: 541 240 393

brno@ortoservis.cz**ČESKÉ BUDĚJOVICE**

Staroměstská 2608, 370 04 České Budějovice

tel./fax: 387 432 502

cb@ortoservis.cz**OPAVA**

Pivovarská 7/71, 746 01 Opava

tel./fax: 553 775 226

opava@ortoservis.czwww.ortoservis.cz

Společnost Ortoservis s.r.o., Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8 je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 72014, IČO 26121760

CZ



REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH
D-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
Telephone: +49 (0) 5431/9416-
Fax: +49 (0) 5431/9416-66
Web: www.rebotec.de
Email: info@rebotec.de



Před prvním použitím výrobku si přečtěte tento návod k použití a mějte jej po ruce pro uživatele i pro budoucí použití a následný prodej.