

NÁVOD K POUŽITÍ

KLOZETOVÉ KŘESLO

513, 513 S



CE

POUŽITÍ

Klozetové křeslo je součástí řady kompenzačních pomůcek pro osoby se sníženou schopností mobility a tělesně postižené. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům toaletu a osobní hygienu, eliminují riziko pádu a zvyšují jeho soběstačnost. Využití nachází především tam, kde není možné, vzhledem k pacientově zdravotnímu stavu, použít standardně vybavené WC.

POPIS

Ocelový rám křesla je doplněn omyvatelným polstrovaným toaletním sedátkem, polstrovanou sedací deskou, opěrkou zad a plastovou toaletní nádobou (ACC/5A). Postranice mají pohodlné polstrované područky. Výškově nastavitelné opěrné nohy jsou opatřeny protiskluzovými nástavci. Model 513 S má navíc odnímatelné postranice s pojistkou proti vytrhnutí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním křesla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Před používáním křesla si přečtěte návod a v případě nejasností kontaktujte dodavatele.

Při montáži křesla postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Vždy kontrolujte, zda je křeslo suché a jsou-li odstraněny zbytky mycích prostředků.

Křeslo nepřetěžujte a nepřekračujte maximální statickou nosnost 120 kg (viz štítek).

Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 100 kg.

Při užívání křesla musí být všechny nohy v kontaktu s protiskluzovým podkladem.

Pro zachování maximální bezpečnosti pravidelně kontrolujte stav všech jistících prvků.

Při transportu (automobilem, autobusem, vlakem apod.) nepoužívejte křeslo k sezení.

Křeslo není určeno pro používání ve vlhkém prostředí (sprcha apod.).

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části křesla, tj. rám s opěrnými nohama, opěrkou zad a područkami, polstrovaný sedák a plastovou hygienickou nádobou ACC/5A.

ÚDRŽBA

Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY


V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ KŘESLA

Pro nastavení výšky křesla vyjměte aretační „E“ pojistku (A) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy. Ve zvolené poloze pojistku zasuňte zpět. Tento postup opakujte u všech čtyř nohou.



Umístění aretačních pojistek

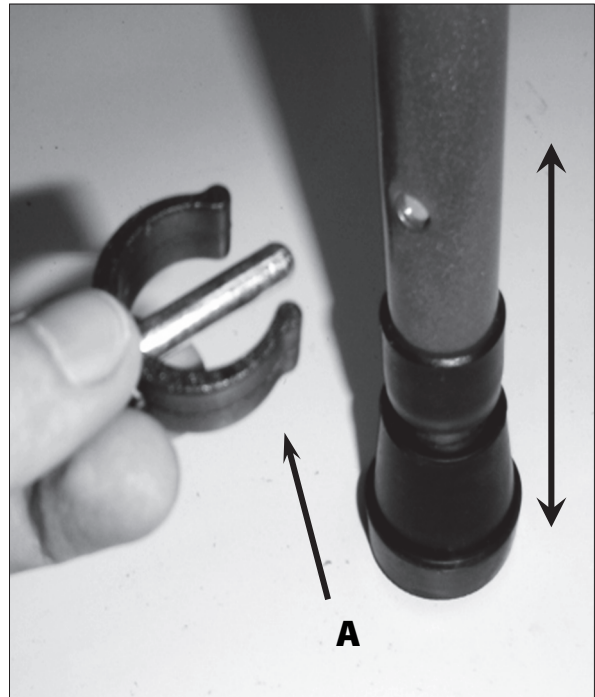

Aretační „E“ pojistka

MANIPULACE S PLASTOVOU HYGIENICKOU NÁDOBOU A PODRUČKOU

Pro použití křesla sundejte polstrovaný sedák a odstraňte víko plastové nádoby. Nádobu pak lze vysunout z držáků pod hygienickým prkénkem dozadu nebo vyjmout po odklopení prkénka horem. U modelu 513 S lze po zmáčknutí pojistky (B) tahem nahoru velmi jednoduše vysunout područku pro lepší nasedání.



Vysunutí/zasunutí plastové nádoby



Vysunutí područky (513 S)