

# NÁVOD K POUŽITÍ

MADLO NA VANU

# 566



## **POUŽITÍ**

Madlo do vany jsou součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardně vybavenou vanu. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny, eliminuje možné riziko pádu při těchto úkonech, usnadňuje manipulaci s pacientem a výrazným způsobem zvyšují jeho soběstačnost.

## **POPIS**

Madlo je vyrobeno kombinací povrchově upravených ocelových trubek vysoké pevnosti a je vybaveno rychloupínacím systémem.

## **TECHNICKÉ PARAMETRY**

Výška madla: 32 cm

Nastavitelné dle šířky okraje vany: 8-15 cm

## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Před používáním madla si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním madla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při upevňování madla k vaně postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Pro větší bezpečnost doporučujeme doplnit madlo protiskluzovou podložkou.

## **ÚDRŽBA**

Madlo lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění madlo řádně osušte. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

## **SERVIS A OPRAVY**


V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, vždy kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

## **OBSAH BALENÍ**


Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části madla, tj. madlo s rychloupínacím mechanismem.

**INSTALACE MADLA**

Vyjměte madlo z krabice a nasadte čelisti (A) na okraj vany a ve zvolené poloze madlo upevněte pomocí rychloupínací aretační páčky (B). Vyklopte páčku do vodorovné polohy, otáčením po směru hodinových ručiček jemně přitáhněte madlo k vaně a páčku přitlačte zpět do původní pozice. Připevňovací čelisti madla jsou opatřeny gumovými koncovkami, které zabraňují poškození vany a zvyšují fixační upevnění madla. Zkontrolujte, zda je madlo pevně ukotveno a nehýbe se ani po zatížení. Pokud tomu tak není je zapotřebí celý postup opakovat. Nyní je madlo připraveno k použití. Pro uvolnění madla postupujte v opačném pořadí.

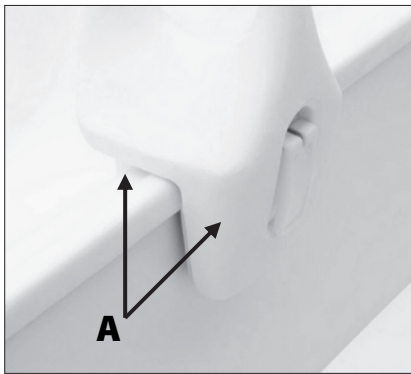

Nasazení madla

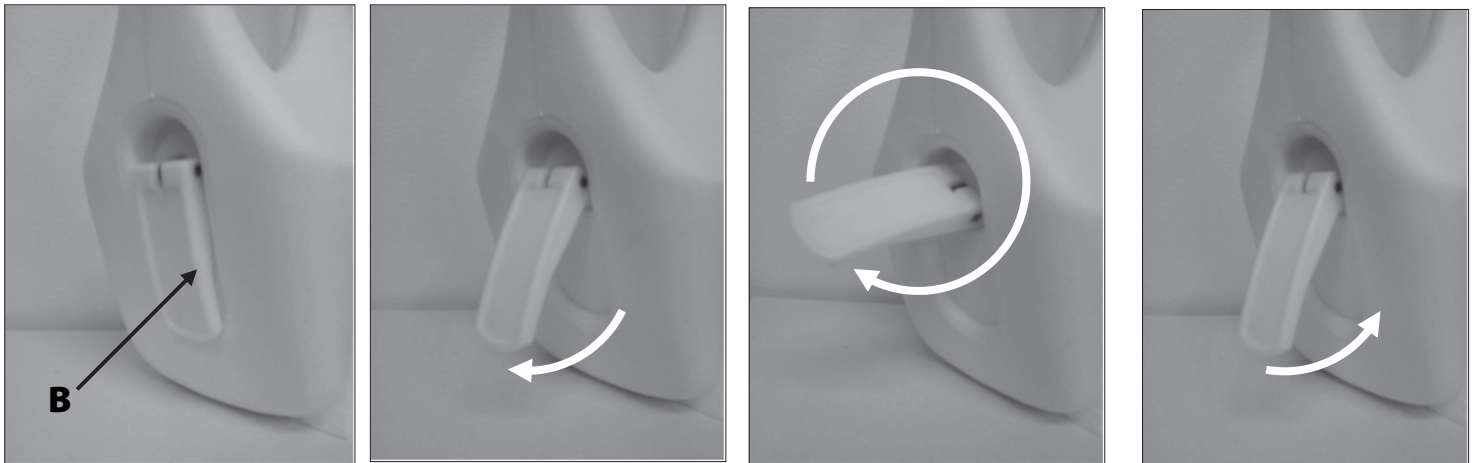

Připevnění madla aretační páčkou