

Evakuační podložka

Návod k použití

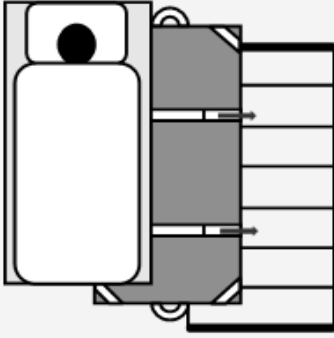
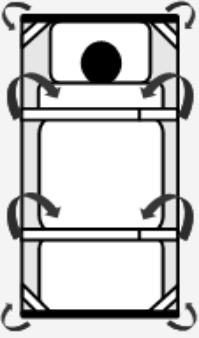
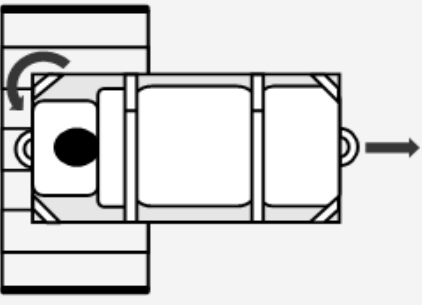
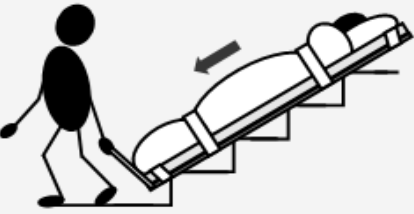
Popis výrobku:

Evakuační podložka (dále jen „EP“) – jednoduchý záchraný systém pro rychlou, bezpečnou a šetrnou evakuaci imobilních nebo částečně imobilních pacientů.

Použití EP:

V nemocnicích a sociálních zařízeních v případě rizikových situací (požár, povodně atd.). Vhodné použití ve stísněných prostorech při evakuaci po schodišti, bez použití výtahu, plošin i nosítek. Můžeme ji také využít i přímo v terénu, kde pomáhá řešit náhlé situace při úrazech a zdravotních potížích pacientů.

Instalace a postup s EP:

1. 	2. 
<p>1. Evakuační podložka je rovnoměrně rozprostřena mezi matrací s pacientem a lůžko. Fixační popruhy uvolněte a povytáhněte. Stejně tak povytáhněte tažná madla.</p>	<p>2. Pacienta informujte, zafixujte podložku přes rohy k matraci a popruhy přetáhněte přes pacienta s pokrývkou a zafixujte. Nakonec zkontrolujete utahení popruhů.</p>
3. 	4. 
<p>3. Otočte evakuační podložku i s pacientem kolmo k lůžku a za tažný popruh u nohou jej stáhněte na zem.</p>	<p>4. Pacienta táhněte po podlaze a stejně tak po schodišti za tažný popruh u nohou a přemístěte jej do bezpečné zóny.</p>

Technické parametry:

Rozměr/nosnost:

200 x 80 cm/ 200 kg

Materiál:

nehořlavý 100% polyester, schopen odolat i velkému zatížení i otěru, přejede rozbité sklo, teplem poškozené podlahové krytiny.

EP má dva fixační popruhy na suchý zip, deset madel kolem celého obvodu, prodloužená jsou tažná madla, v rozích má čtyři pružné úchyty pro uchycení matrace.

Údržba:

EP skladujte v suchém prostředí a jednou ročně zkontrolujte popruhy a madla.

Výrobek můžeme prát na 40°C i žehlit.



Záruka:

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením a skladováním.

Požární směrnice zdravotnických zařízení musí obsahovat evakuační plán nepohyblivých a ležících osob, s uvedením prostředků, které budou použity!

Dodavatel: Ortoservis s.r.o., Ronkova 13 / 353, 180 00 Praha 8 – Libeň, tel.: 266 310 967, www.ortoservis.cz

Dodavatel ujistňuje spotřebitele, že na tento výrobek bylo vystaveno prohlášení o shodě. Verze 2.0., 1.4.2016.