



EZ-100/150 Podložka pro přesun pacienta

Systém pro přenos pacientů

Návod k použití

PŘEDMLUVA

Před použitím tohoto výrobku doporučujeme, abyste si přečetli všechny informace uvedené v tomto návodu k použití. Konstrukce a vylepšení výrobku jsou v souladu s požadavky Směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích. Tyto pokyny jsou pouze vodítkem a nenahrazují protokoly a postupy, které navrhl váš koordinátor pro manuální manipulaci.

POPIS VÝROBKU

EZ-100/150 je lehké, sklopné zařízení na přesun pacientů, pomocí kterého lze pacienta přenést mezi lůžkem a rentgenovým stolem, operačním stolem, sprchovým vozíkem nebo nosítky sanitky. Jde o účinnou desku na přesun pacienta a polstrovanou posuvnou trubici v jednom.

SPECIFIKACE VÝROBKU

EZ-100/EZ-150 Podložka pro přesun pacienta

	EZ-100	EZ-150
VELIKOST	177 X 55cm (±3%) (nesložená) 88 x 55cm(±3%) (složená)	89 x 53,5 cm (± 3%)
HMOTNOST	2,5 KG (±3%)	1,4 KG(±3%)

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před přenosem pacienta se ujistěte, že jsou postel, nosítka, vozík a stoly bezpečně zajištěny brzdou.

- Předtím, než na ně položíte EZ-100/150, ujistěte se, že jsou postel a nosítka, vozík či stoly ve vyrovnané poloze.

Maximální bezpečná mezera pro přenos je 15 cm mezi dvěma povrchy, ale důrazně se doporučuje, aby byly všechny povrchy pokud možno ve vyrovnané poloze.

- Nesterilizujte EZ-100/150 při vysoké teplotě.
- Při rolování EZ-100/150 se ujistěte, že jsou pacientovy vlasy umístěny na vnější vrstvě a mimo dosah rolování k okraji, aby se zabránilo zachycení vlasů během rolování
- EZ-100/150 očistěte povrchovým dezinfekčním prostředkem. Nepoužívejte vysokou teplotu.
- Bezpečné pracovní zatížení je 200 kg.

POKYNY K POUŽITÍ




1. Rozložte EZ-100/150 a nasuňte ji vedle pacienta.



2. Nakloňte pacienta na jednu stranu a narolujte pod něj EZ-100/150




3. Jemně pacienta tlačte a EZ-100/150 se jednoduše přesune přes mezeru z postele do postele

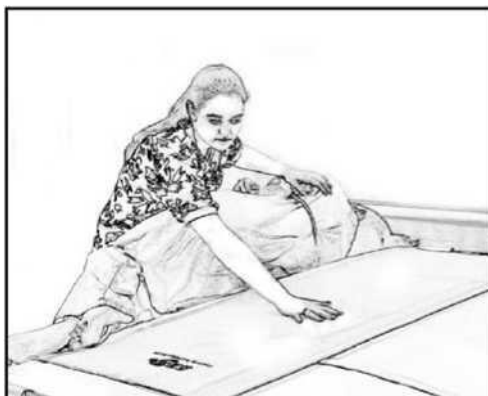

4. Nakloňte pacienta na stranu a vysuňte EZ-100/150 zpod pacienta. Pak můžete podložku snadno vytáhnout.

VÝKRES A SEZNAM ČÁSTÍ

【EZ-100】

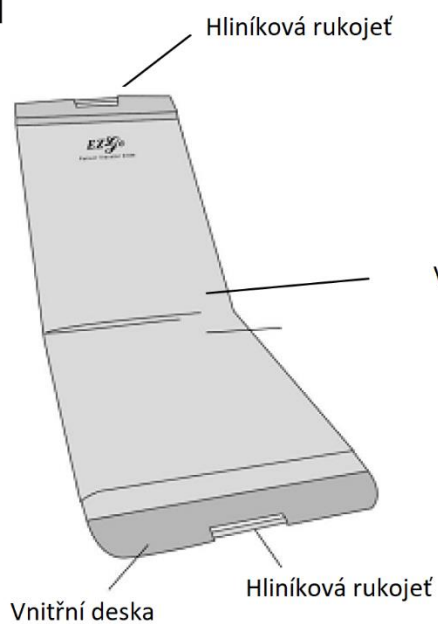

【EZ-150】



ES prohlášení o shodě

Níže podepsaný, Terry Kuo, zastupující EZ-Care Solution Co. Ltd., 5F., No. 15, Lane 548, RueiGuang Rd., Neihu District, Taipei, Tchaj-wan (Čína) 114; dodavatel prohlašuje, že výrobky popsané níže:

Systém pro přesun pacientů EZ-Go

Model:

EZ100/100P/110/150/150P/200/211 řady /215/221/230/250 Podložka na přesun pacienta

EZ-115 Sada pro domácí péči

EZ-300/EZ-410 Otočný polohovací polštář

EZ-510/520/EZ-510 Deska pro přesun typu motýl

EZ-600 (6 směrná) Multifunkční podložka pro přesun pacienta

EZ-610 (6 směrná plus) Multifunkční podložka pro přesun pacienta

EZ-710 Evakuační křeslo pro přesun pacienta

EZ900/905/910/915/925/900B/900C/905B/901B/915B/925B Pás pro přesun pacienta

EZ-950 Repoziční pás

EVC-100/200/300 Nouzová evakuační lehká nosítka

EVC400/EVC500 Nouzová evakuační podložka/Evakuační matrace

Systém prevence pádu CareWatch

Model:

OWG-MAT/CW400 Jednosměrná protiskluzová matrace

PA-BED / PA-CHAIR bezpečnostní podložka s alarmem

CW100 Nastavitelná pomocné madlo k posteli

CW-300 Multifunkční chodítko



jsou prostředky třídy I dle směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

Pokud je používán a udržován v souladu s obecně uznávanými pravidly správné praxe a doporučeními v návodu k použití, splňuje základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

Pro nejvíce specifická rizika tohoto zařízení byla bezpečnost a shoda se základními požadavky směrnice posuzována na základě:- Mezinárodní norma ISO 14971:2000.



výkonný ředitel Podpesáno na **TCHAJ-WANU**

dne **14. července 2020**

Obelis s.a.

Bd General Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +3227325954
Fax: +3227326003
mail@obelis.net