



EZ-610 Plus+ Měkká nosítka
pro přesun pacienta

Podložka pro přesun pacienta


NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEDMLUVA

Před použitím tohoto výrobku doporučujeme, abyste si přečetli všechny informace uvedené v tomto návodu k použití.

Konstrukce a vylepšení

výrobku jsou v souladu s požadavky Směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích Tyto pokyny jsou pouze vodítkem a nenahrazují protokoly a postupy, které navrhl váš koordinátor pro ruční manipulaci.

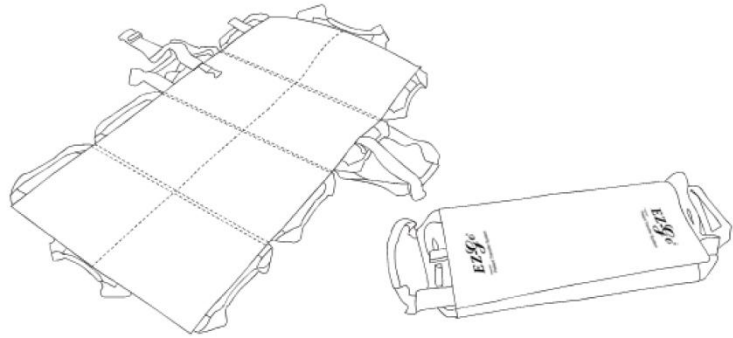

POPIS VÝROBKU

Šestisměrná Plus+ měkká nosítka na přesun pacienta jsou multifunkční a užitečný nástroj pro pečovatele. Kombinují v sobě přesuvnou podložku a asistenční pás a pomáhají polohovat pacienty v posteli, otáčet je do stran, posadit je, otočit, vstát, přemístit z postele na invalidní vozík a navíc jsou vhodná v případě nouzového úniku.

EZ-CARE


EZ-Care Solution Co. 5F, No. 15 Lane 548 Rueiguang Rd. Neihu Dist. Taipei Taiwan

TEL: +886-2-2659-2277 FAX: +886-2-2798-8321 E-mail: info@gumt.com.tw Website: www.ezcaresolution.com




Rukojeti


TOUTO STRANOU DOLŮ

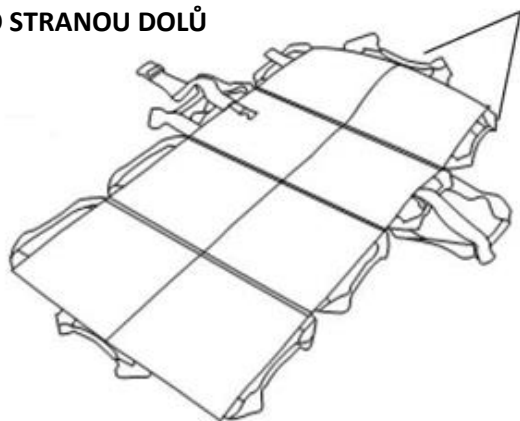

BEZPEČNOSTNÍ PÁS

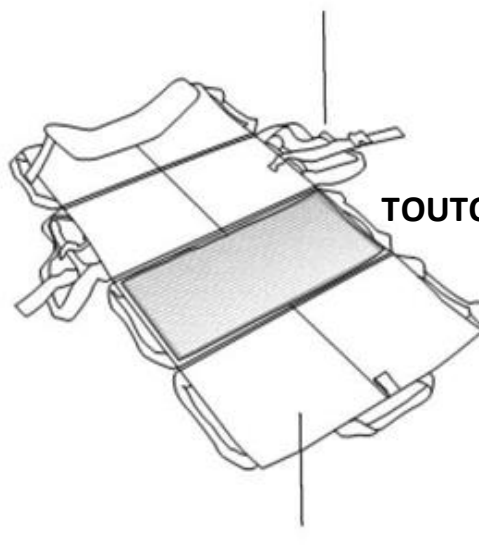

TOUTO STRANOU
NAHORU

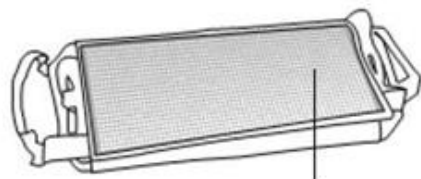


PROTISKLUZOVÝ ASISTENČNÍ PÁS

VODOTĚSNÁ, PRODYŠNÁ TKANINA

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Před použitím se poraďte se svým lékařem o dalších informacích o konkrétních zdravotních stavech nebo příznacích, které můžete mít.
2. Ujistěte se, že jste si přečetli všechny informace uvedené v tomto návodu k použití.
3. Zkontrolujte všechny rukojeti tak, že za ně pevně zataháte různými směry.
4. Vizuální kontrola - pravidelně a vždy po praní zkontrolujte stav a funkci výrobku.
5. Před přesunem věnujte pozornost oblasti hlavy pacienta. Pokud je to nutné, použijte opěrku hlavy, abyste snížili riziko obstrukce dýchacích cest.
6. Před přesunem se ujistěte, že je bezpečně upevněn bezpečnostní pás.

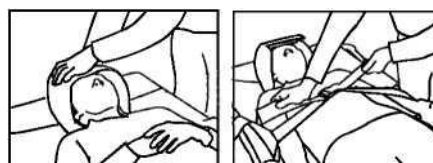

EZ-Care Solution Co. 5F, No. 15 Lane 548 Rueiguang Rd. Neihu Dist. Taipei, Tchaj-wan

TEL: +886-2-2659-2277 FAX: +886-2-2798-8321 E-mail: info@gumt.com.tw Web: www.ezcaresolution.com


7. Pokud jsou na nosítkách patrné známky opotřebení nebo poškození, výrobek vyřadte a obraťte se na místního prodejce ve vašem okolí.



NÁVOD NA ČIŠTĚNÍ


1. Nebělte.
2. Před praním zapněte bezpečnostní pás a použijte pytel na prádlo.
3. Nechte uschnout nebo sušte v sušičce při nízkých teplotách, abyste zajistili maximální životnost produktu.

NÁVOD NA SKLÁDÁNÍ

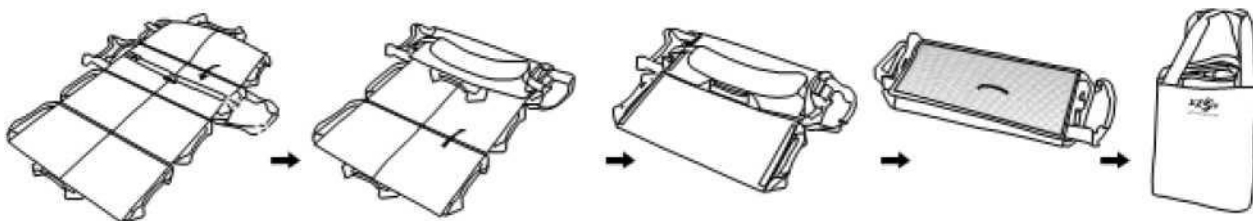

NÁVOD K OBSLUZE

UMÍSTĚNÍ

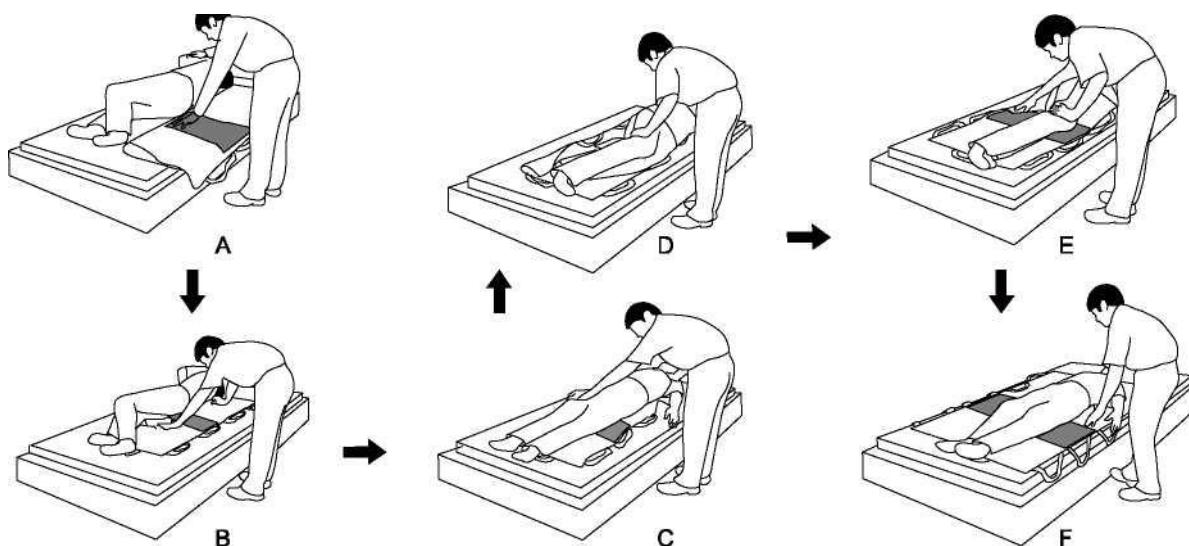


EZ-Care Solution Co. 5F, No. 15 Lane 548 Rueiguang Rd. Neihu Dist. Taipei, Tchaj-wan

TEL: +886-2-2659-2277 FAX: +886-2-2798-8321 E-mail: info@gumt.com.tw Web: www.ezcaresolution.com

POHYB V POSTELI




Dvě osoby

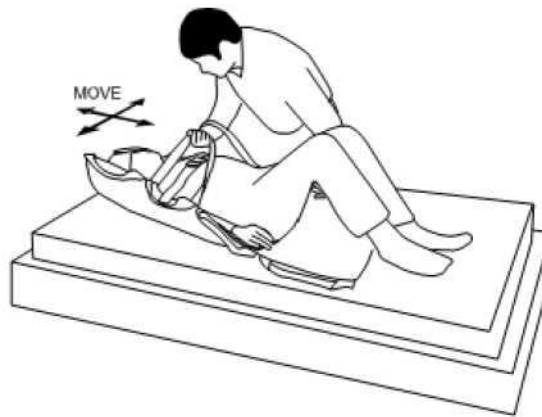


Jedna osoba


OTOČENÍ V POSTELI

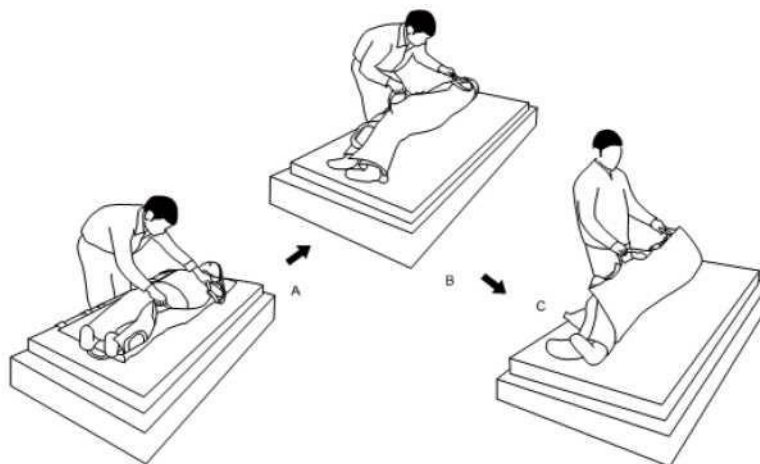

SED

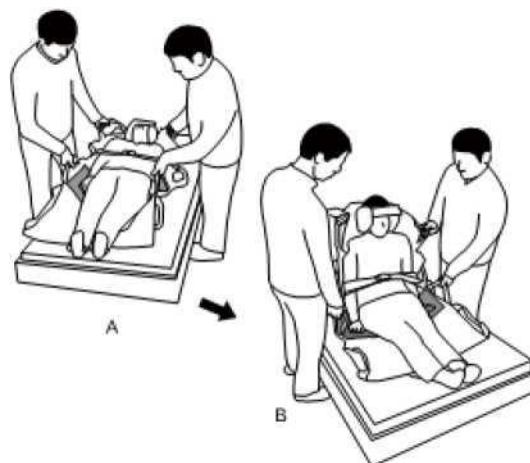


OTOČENÍ

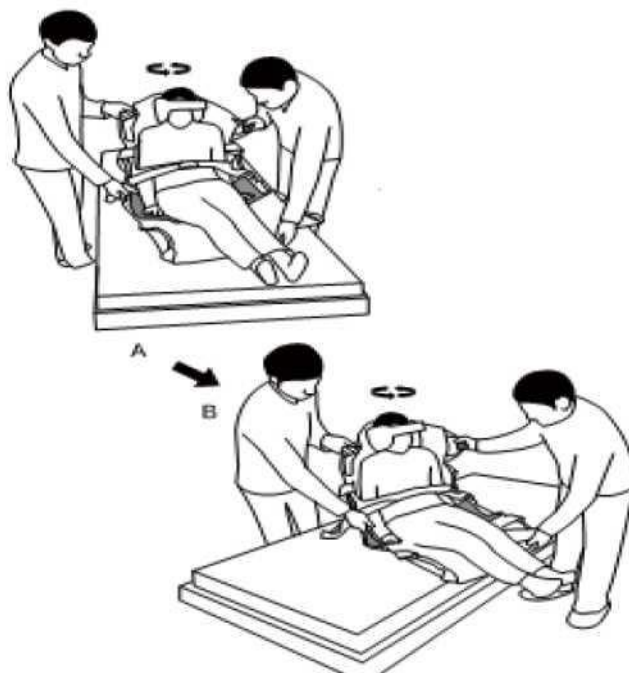

VSTANUTÍ




★ Použití asistenčního pásu

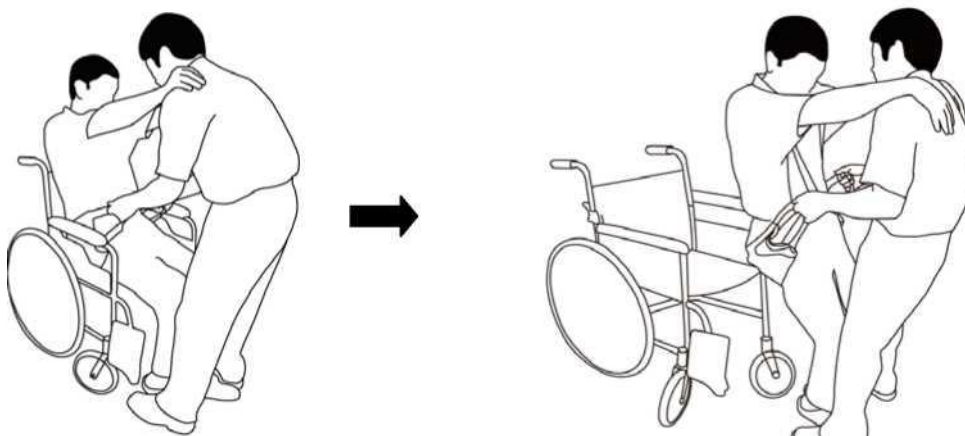


EZ-Care Solution Co. 5F, No. 15 Lane 548 Rueiguang Rd. Neihu Dist. Taipei,
Tchaj-wan

TEL: +886-2-2659-2277 FAX: +886-2-2798-8321 E-mail: info@gumt.com.tw
Web: www.ezcaresolution.com


PŘESUN (z postele na invalidní vozík)

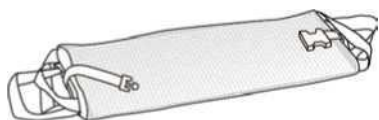


★ Použití asistenčního pásu

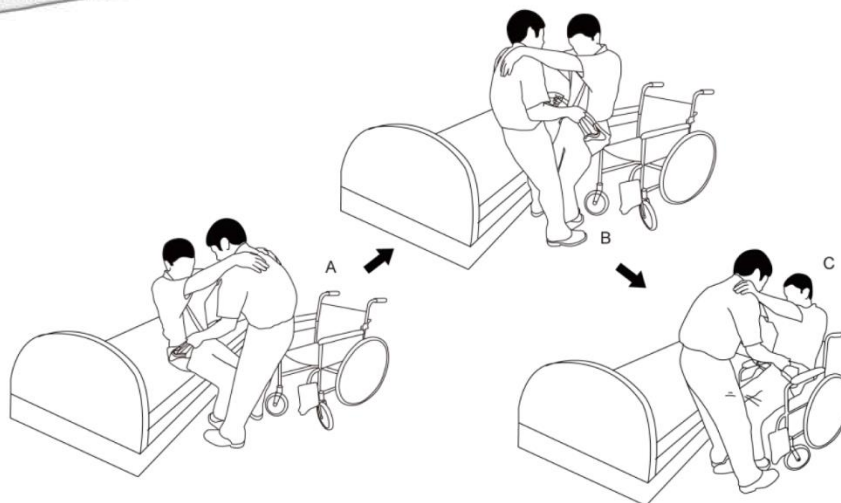



PŘESUN (z invalidního vozíku na postel)

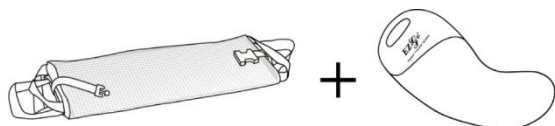


★ Použití asistenčního pásu + desky na přesun typu delfín

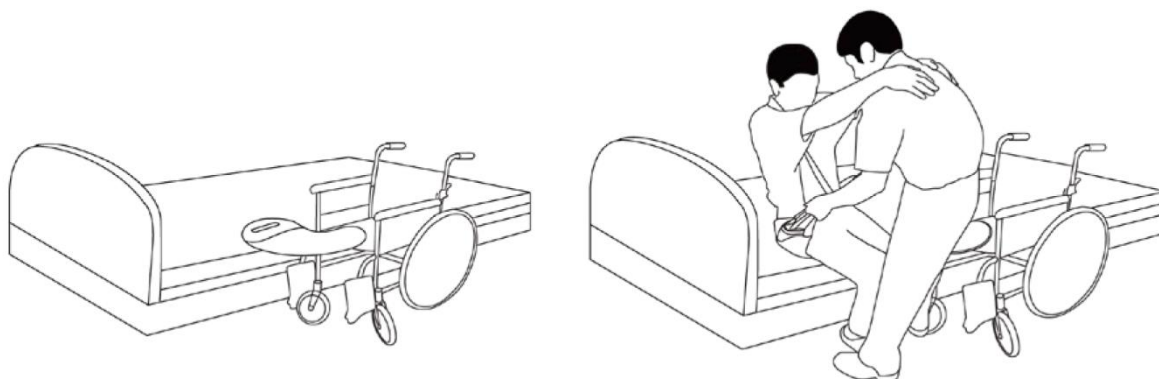

NOUZOVÝ ÚNIK

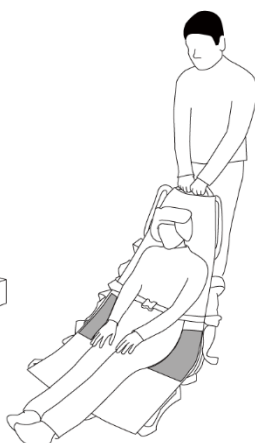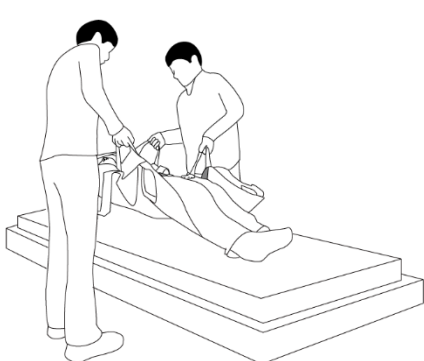

NEBO

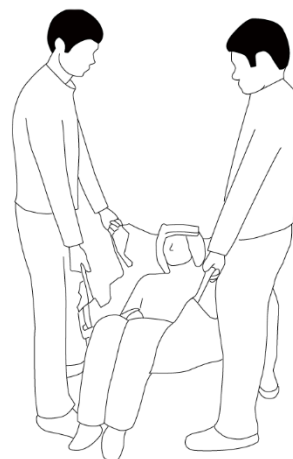

Tažení jednou osobou

Zvednutí dvěma osobami

KONTROLNÍ SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH FUNKCÍ

Pol.	Obsah kontroly a požadavky na bezpečnost	Výsledek kontroly	Komentář
1	Jsou uvedené informace o zákazníkovi úplné?	OK	
2	Je zobrazený jazyk stejný jako požadoval zákazník?	OK	
3	Ujistěte se, že jsou všechny základové šrouby bezpečné a nástroj je v dobrém stavu	OK	
4	Potvrďte, že jsou připevněny všechny výstražné značky a označení.	OK	
5	Povrchy, hrany nebo rohy byly zbaveny otřepů	OK	
6	Typový štítek	OK	
7	Značka CE	OK	
8	Návod k použití	OK	
9	Zkontrolujte bezpečnostní prvky odkazující na TCF	OK	
10	Podepsané ES prohlášení o shodě	OK	

