

## KOLEČKA

Vozík je vybaven čtyřmi plnými otočnými kolečkami o průměru 12,5 cm. Všechna kolečka mají brzdy s aretací. Nasedáte-li na vozík, mějte jej vždy zabrzděný. Vozík zabrzdíte tak, že sešlápnete vnější část červené plochy brzdy, odbrzdíte jej pak sešlápnutím vnitřní části nášlapné plochy brzdy.

**POZOR:** Při nasedání na vozík, či vstávání z něj, musí být vždy zabrzděn!

## Údržba vozíku

Vozík je vyroben z kvalitní umělé hmoty a nerez. Plastové povrchy odpuzují nečistoty, jsou odolné vůči oděru a jsou příjemné ve styku s pokožkou. Při čišťení používejte obvyklé čisticí prostředky (saponáty) v návodem stanovené koncentraci. Na vozík lze použít i běžné dezinfekční prostředky. Příležitostné naolejování pohyblivých částí vozíku přispěje k bezporuchovému provozu a prodlouží jeho životnost.

**POZOR:** Hydraulický olej je hořlavina.

## Záruka a opravy

Na vozík je poskytována záruka 2 roky na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a vady vzniklé nesprávným používáním. Se záručními a ale i s pozáručními opravami se vždy obraťte z důvodu zachování záruky pouze na naše odborná pracoviště na níže uvedených adresách. Věříme, že Vám vozík ulehčí Vaši situaci a že s ním budete spokojeni.

Váš dodavatel

**Ortoservis**

Středisko Praha  
Ronkova 13/353  
180 00 Praha 8  
tel: 266 313 652  
fax: 266 313 652-11

Středisko Opava  
Pivovarská 7/71  
746 01 Opava  
tel/fax: 553 775 226

Středisko České Budějovice  
Staroměstská 2608  
370 04 České Budějovice  
tel/fax: 387 432 502

Středisko Brno  
Minská 100  
616 00 Brno  
tel/fax: 541 240 393

❗ Dodavatel ujistí spotřebitele, že na tento výrobek bylo vystaveno prohlášení o shodě.

Návod ze dne 16.1.2017. Verze 01.17

# ORTOSERVIS

Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8,  
tel: 266 313 652, fax: 266 313 652-11

**M**  
VITA MAXIMA



**Návod k použití:**

**POLOHOVACÍ A SPRCHOVACÍ VOZÍK PHOENIX  
S HYDRAULICKÝM ZDVIHEM**


## Popis vozíku

Vozík určený k omývání a sprchování pacientů, ale také jako toaletní vozík. Velmi snadný systém polohování umožní záklon sedačky a zádové opěrky do úhlu 130° a současně zdvih lýtkové opory o 67°. Tento systém podstatně zlepšuje manipulaci s pacientem nejen při mytí, ale i při jeho samotných přesunech na lůžko a zpět. Vozík je navíc doplněn hydraulickým zdvihem, který umožní snadnější provedení hygieny ošetřující osobou. Sprchovací vozík má plastovou toaletní nádobu a dvoudílný sedák, který umožňuje vyjmutí nádoby jak zezadu, tak shora.

Použité materiály jsou vysoce kvalitní, na dotyk příjemná umělá hmota, dural a nerez. Polstry a stavitelná opěrka hlavy jsou z měkčené PU pěny. Postranní loketní opěrky jsou odklopiteľné, opatřeny aretačními kolíky. Použití při teplotách +5 °C až +40°C. Vozík je určen pro pohyb v interiéru a není vhodný pro dlouhodobé sezení.

**POZOR:** Dbejte zvýšené opatrnosti v situacích, kdy může mít vozík sníženou stabilitu, a to při nasedání na nerovném povrchu, při tlačení ve zvýšené poloze, při tlačení na rampách a jiném nerovném povrchu. V případě, že pacient je neklidný nebo má svévolné, spastické pohyby, doporučujeme asistenci druhého pečovatele.

### Technické parametry:

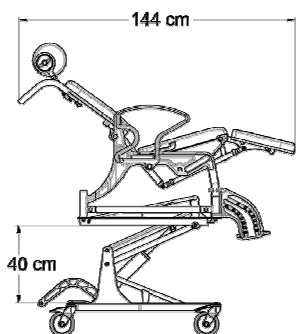

### PODRUČKY

Područky vozíku jsou odklopiteľné směrem dozadu. Vytažením aretačního kolíku ve spodní části loketní opěrky lze celou postranicí sklopit směrem dozadu. Toto odklopení usnadňuje přesedání na vozík z postele či židle. Po zpětném přiklopení postranice vždy aretujte a zkontrolujte, zda zaklapnul aretační kolík.

## ZÁDOVÁ OPĚRKA A OPĚRKA HLAVY

Zádová opěrka a opěrka hlavy jsou z měkčené PU pěny. Zádová opěrka je úhlově stavitelná pomocí vytažené aretační páky na pravé straně sedáku směrem nahoru. Náklon se děje pomocí táhel. Zatlačením aretační páky směrem dolů ukončíme náklon. Zádová opěrka je opatřena tlačným madlem. Opěrku hlavy lze otočením nastavit do různé výšky a také posouvat podle tělesné výšky pacienta.

## SEDÁK, PODNOŽNÍ POLSTR A NÁDOBA

Sedák je tvořen dvěma díly. Spodním dílem a vrchní tvarovanou deskou s otvorem. Tento otvor je dále překryt měkčeným krytem. Nádobu je zavěšena ve spodní části sedačky a je možno ji vyjmout zezadu. Po zvednutí horního dílu sedačky je možno nádobu vyjmout i směrem nahoru. Nádobu je opatřena víkem a uchem. Před použitím je nutno odstranit víko a kryt sedáku.

**POZOR:** Při polohování náklonu vozíku je třeba odejmout nádobu, mohlo by dojít k jejímu vyklopení. Před usednutím pacienta se prosím ujistěte, že je PU sedák upevněný k rámu vozíku!

## STUPAČKY

Vozík je vybaven dvěma plastovými stupačkami. Obě stupačky jsou samostatně odklopiteľné do strany a jejich nášlapné plochy jsou sklopiteľné vzhůru. Chcete-li stupačku odklopit, nejprve sklopte nášlapnou plochu, poté mírně zvedněte celou stupačku a otočte ji směrem ven z vozíku až do polohy rovnoběžné s bočnicí. Nášlapnou plochu stupačky lze i výškově upravit dle požadavků uživatele. Toto nastavení lze provést po demontáži dvou šroubů. Po nastavení šrouby opět pevně utáhněte.

**POZOR:** Při nasedání na vozík, či vstávání z něj mějte vždy nášlapné plochy ve svislé poloze, či stupačky plně odklopené a vozík musí být vždy zabrzděn! Nikdy se nestavějte na stupačky, mohlo by dojít k jejich zlomení!

## ZDVIH

Rozsah hydraulického zdvihu je 40 cm, lze tak docílit výšky sedu 60 až 100 cm. Hydraulický zdvih je ovládán nožní pákou nášlapem (směr nahoru), spuštění je provedeno zdvihem nožní páky.



**POZOR:** Dbejte opatrnosti, aby nedošlo ke skřípnutí tělesných částí pacienta do pohyblivých částí vozíku, proto nesahejte mezi rám a sklopné postranice, zabraňte, aby se části těla dostaly mezi pohyblivý sedák a rám, mezi podnožky a rám vozíku, mezi opěrku hlavy a rám zádové opěrky!