



Manuální vozík s textilním sedákem

NÁVOD K OBSLUZE




Distributor: **SENIOR VIA s.r.o.**
Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, www.seniorvia.cz
Dovozce: M.C.K. IMPORT s.r.o., Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1



SV032002U

Při pohybu dolů z příkrého, nebo nahoru do příkrého svahu, dbejte na to, aby doprovázející osoba byla v těsné blízkosti vozíku. V opačném případě by se vozík mohl převrátit. Při pohybu dolů z příkrého svahu by měl být vozík natočen směrem do svahu a doprovázející osoba by měla opatrně s vozíkem zacouvat dolů.

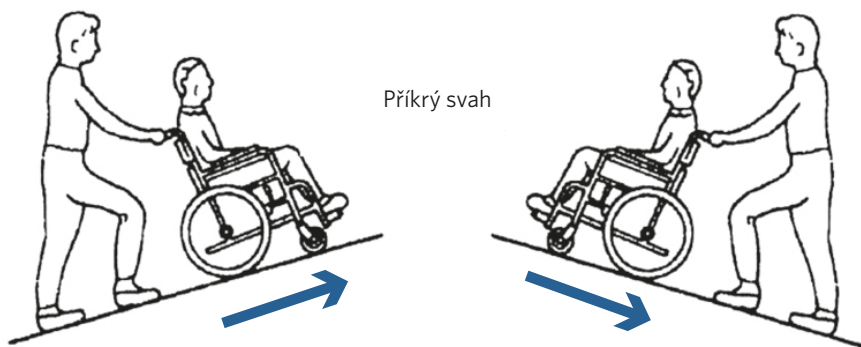

! Bezpečnostní upozornění

- ▶ Před používáním manuálního vozíku si pečlivě přečtěte návod k použití.
- ▶ Zvedání předmětů ze země může být pro uživatele sedícího na vozíku nebezpečné, protože posunutím těžiště může dojít k převrácení vozíku a zranění uživatele.
- ▶ Brzdy se nepoužívají ke snížení rychlosti vozíku. Zatáhnutí brzd vozíku v pohybu může být pro uživatele nebezpečné.
- ▶ Brzdy používejte vždy, i v případě, že zastavujete jen na krátkou dobu.
- ▶ Vždy mějte na paměti bezpečnost. Pokud se osoba se sníženou mobilitou necítí dobře při samostatném ovládní vozíku, měla by požádat o doprovod.
- ▶ Nesedejte na vozík, pokud není zcela rozložen.

Údržba

Vozík lze čistit a udržovat běžnými čistícími prostředky vhodnými pro čištění daných materiálů tzn. PVC a kovu, které neobsahují rozpouštědla. Vždy dokonale osušte. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav koleček a paprskových kol, polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebovaná kolečka i paprsková kola.


Záruka

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.

Manuální vozík s textilním sedákem SV032002U

Ocelová konstrukce s textilním sedákem a opěrkou, 8" PVC kolečka a 24" paprsková kola.

Manuální vozík s textilním sedákem je určen jako kompenzační pomůcka pro tělesně postižené osoby a pro osoby se sníženou schopností mobility. Použit ho může jak uživatel sám, tak s pomocí druhé osoby.

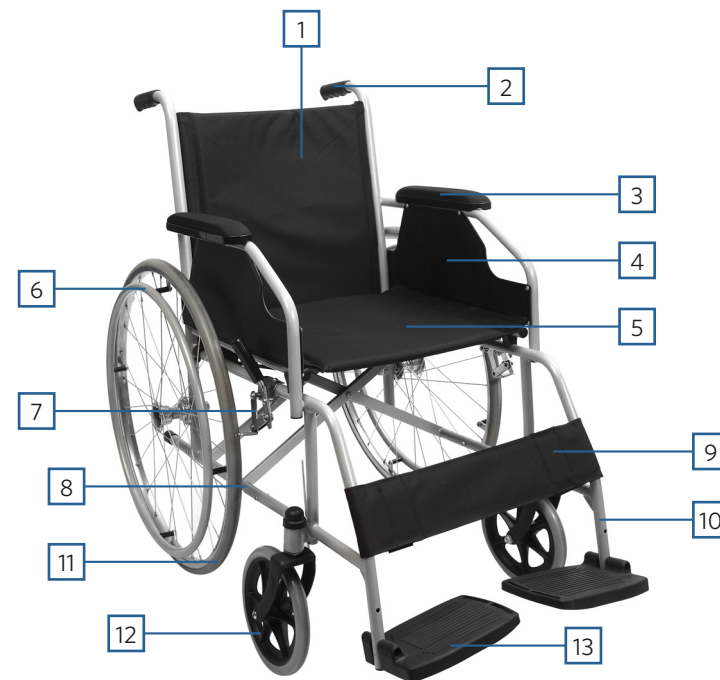

1. Opěrka zad
2. Madlo
3. Loketní opěrka
4. Boční panel
5. Sedadlo
6. Ruční ráfek
7. Brzda
8. Sklápěcí tyč
9. Opěrka nohou
10. Závěs podnožky
11. Paprskové kolo
12. PVC kolečko
13. Podnožka


Rozměry (cm)	Model	66	28	45	60	20	48	87	101	40	40	(kg)	NW GW
	SV032002U											100	12,7/14,9

Upozornění

**Vhodnost použití vozíku konzultujte s ošetřujícím lékařem.
Nevhodné pro osoby s hmotností vyšší než 100 kg.**


Rozložení vozíku

1. Vozík postavte na kola.
2. Postavte se za vozík.
3. Uchopte madla [2] a táhněte je do stran.
4. Poté zatlačte sedadlo [5] směrem dolů.

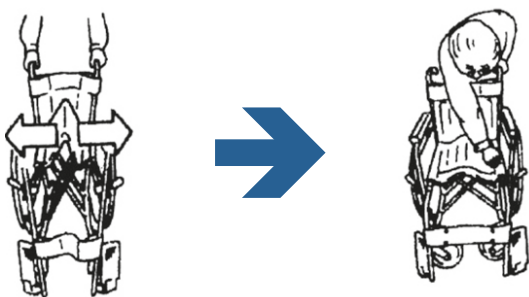


Složení vozíku

1. Otočte podnožky [13] směrem nahoru.
2. Postavte se z boku k vozíku a uchopte sedadlo [5] oběma rukama dle obrázku.
3. Táhněte sedadlo [5] nahoru, dokud nebude vozík zcela složen.

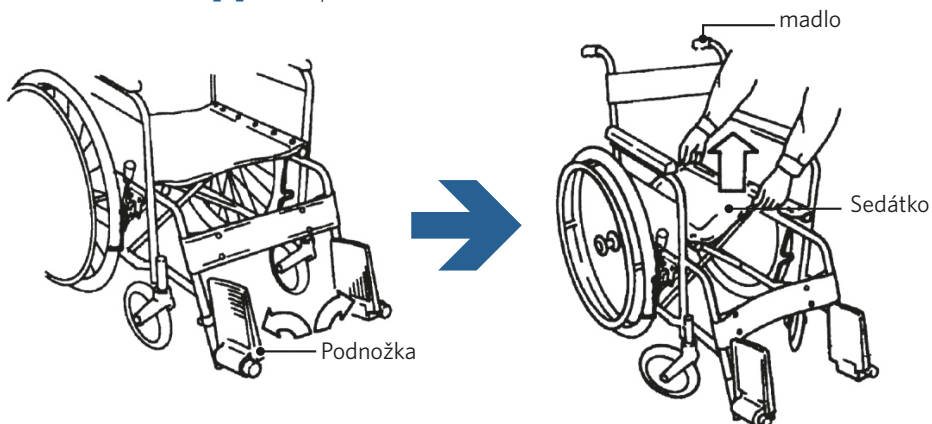


Podnožka

Před nasedáním a vysedáním se ujistěte, že podnožky [13] nejsou sklopeny. Sklopte je, až po nasednutí na vozík. Pokud byste stoupli při nasedání či vysedání na podnožku, hrozí překlacení vozíku a jeho pád. Před tím, než se s osobou na vozíku rozjedete, ujistěte se, že má obě nohy na podnožkách.

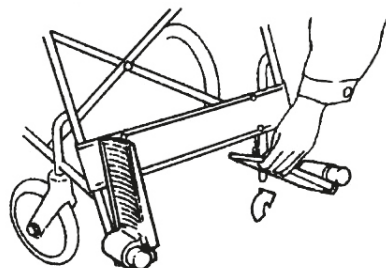

Použití brzdy

Brzdy [7] jsou na obou stranách vozíku. Brzdí se pomocí páky, kterou posunete směrem od paprskového kola [11], k odbrždění vraťte páku do vzpřímené polohy. Před nasedáním a vysedáním mějte vozík vždy zabrzděný. Sílu brzdícího účinku je možné přizpůsobit povolením šroubu, kterým je brzda připojena k rámu vozíku a nastavení brzdy do požadované polohy. Po nastavení šroub pevně utáhněte. Je velmi důležité zkontrolovat účinnost brzd před použitím vozíku.

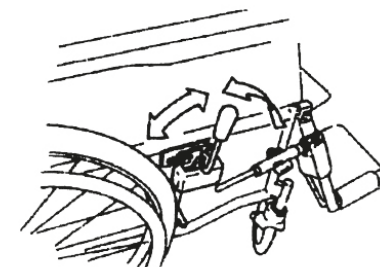

Použití vozíku

Uživatel vozíku může použít ruční ráfek [6] k manipulaci s vozíkem libovolným směrem. Je důležité, aby uživatel používal jenom ruční ráfky nikoli kola, které by mohly způsobit úraz uživatele.

Vozík může vést i doprovázející osoba, která musí vždy stát za vozíkem a k manipulaci používat pouze madla [2], nikoli ruční ráfky. Navíc, z vnější strany na opěrce zad [1] je kapsa, která může sloužit na uložení drobných předmětů.

Pro zvednutí vozíku na schod musí doprovázející osoba šlápnout na sklápěcí tyč [8] a zatlačit madla směrem dolů, tak se přední kolečka zvednou na schod. Poté vytáhněte vozík za madla [2] směrem nahoru, aby se zvedla i paprsková kola. Nesnažte se přejíždět schody silou.

