


Stolička do sprchy NIZZA

Stolička do sprchy je určena k usnadnění sprchování osobám se sníženou hybností kyčelních, případně kolenních kloubů v koupelnách vybavených sprchovým koutem. Sedačku doporučujeme doplnit protiskluzovou podložkou jak na dně sprchové vaničky, tak venku před sprchovým koutem. Stolička se dodává v provedení s hygienickým výřezem, opěradlem a područkami

POPIS VÝROBKU - Konstrukce stoličky je tvořena plastovými výlisky sedačky, zádové opěrky a područek, osazena je aluminiiovými výškově stavitelnými nožkami s protiskluzovými koncovkami. Tyto gumové návleky zabraňují poškrábání sprchového koutu a umožňují bezpečné a stabilní umístění sedačky. Sedačka není nijak fixována na podlaze a při jejím použití to mějte na zřeteli. Výška sedačky od země je nastavitelná v rozmezí 41,5 – 56,5 cm: vyjměte aretační kolík na noze sedačky, nastavte výšku dle Vaší potřeby a kolík s objímkou opět zasuňte do otvoru. Všechny kolíčky musí být ve stejné výšce, aby sedačka byla stabilní. Vždy zkontrolujte pevnost nastavení. Nosnost sedačky je 130 kg.

SESTAVENÍ - Stolička je dodávána v rozloženém stavu. Při montáži nejdříve nasuňte do otvorů všechny nohy a dále postupujte dle obrázku. Jednotlivé díly (záda, loketní opěrky) nakloňte směrem dovnitř sedáku, zasuňte do drážky a směrem ven ze sedačky a tlakem dolů zacvakněte. Poté otočte sedačku a zespodu nasuňte pojistný kolík (červený).

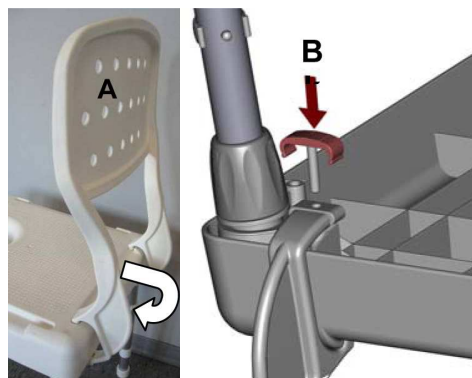

ÚDRŽBA - Použitý materiál sedačky lze snadno čistit běžnými saponátovými prostředky a dezinfekčními prostředky pro použití na plasty. Sedačku nikdy nečistěte přípravky, které obsahují brusivo. Sedačku nevystavujte teplotám nad 85 °C.

ZÁRUKA A OPRAVY - Na sedačku je poskytována záruka 2 roky na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a vady vzniklé nesprávným používáním. Se záručními a ale i s pozáručními opravami se vždy obračejte z důvodu zachování záruky pouze na naše odborná pracoviště na níže uvedených adresách. Věříme, že Vám sedačka ulehčí Vaši situaci a že s ní budete spokojeni.

Váš Dodavatel

SERVISNÍ STŘEDISKA ORTOSERVIS - VITA MAXIMA

Středisko Praha
Ronkova 13/353
180 00 Praha 8
tel: 266 313 652
fax: 266 313 652-11

Středisko Opava
Pivovarská 7/71
746 01 Opava
tel/fax: 553 775 226

Středisko České Budějovice
Staroměstská 2608
370 04 České Budějovice
tel/fax: 387 432 502

Středisko Brno
Minská 100
616 00 Brno
tel/fax: 541 240 393

① Dodavatel ujišťuje spotřebitele, že na tento výrobek bylo vystaveno prohlášení o shodě.

Návod ze dne 15.12.2011, Verze 12.011