

ORTOSERVIS

Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8

☎ 266313652 📠 266313652-11



VITA MAXIMA



Open Ocean nastavitelná




Open Ocean pevná

Návod k použití toaletní židle
OPEN OCEAN

Popis židle

Toaletní židle Open Ocean jsou součástí řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou mobilitou. Usnadňují uživatelům běžné úkony osobní hygieny a zvyšují jejich soběstačnost. Židle nejsou určeny pro sprchování a převoz. Toaletní židle má kovovou konstrukci s povrchovou úpravou komaxit. Sedák a zádová opěrka je polstrovaná, svrchní vrstva je z omyvatelného PVC. Toaletní nádoba je opatřena víkem a uchem. Toaletní nádobu lze vyjmout vrchem po odklopení sedáku s víkem. Židle se dodává s pevnou výškou sedáku 51cm a s nastavitelnou výškou sedáku v rozmezí 45 až 62 cm. Nohy židle s nastavitelnou výškou jsou opatřeny gumovými násadci. Po sejmutí horního víka ve tvaru vajíčka a odstranění víka nádoby je židle připravena k použití.

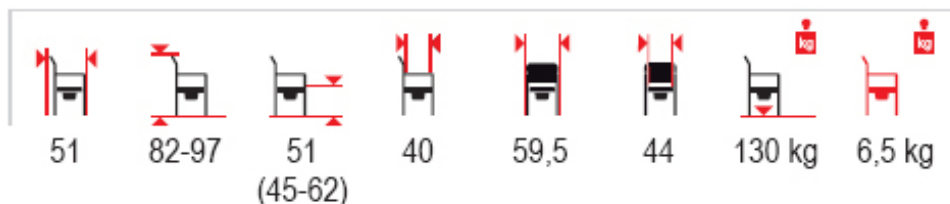

Výškové nastavení židle

Požadovanou výšku židle nastavíme po vytažení aretační pojistky a zabezpečíme opětovným zacvaknutím této pojistky. Při nastavení je nutno dbát na to, aby všechny nohy byly pevně zaaretovány a měly shodnou výšku.

Údržba židle

Při čistění židle i toaletní nádoby používejte obvyklé čisticí a dezinfekční prostředky (saponáty) v návodem stanovené koncentraci. Tyto prostředky nesmějí obsahovat rozpouštědla a způsobovat mechanické narušení povrchu. Pro zachování maximální stability židle doporučujeme pravidelně kontrolovat aretační pojistky a celkovou pevnost.

Záruka

Na židli je poskytována záruka 2 roky na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a vady vzniklé nesprávným používáním. Se záruční reklamací se vždy obrazejte pouze na naše odborná pracoviště na níže uvedených adresách. Věříme, že Vám židle ulehčí Vaši situaci a že s ní budete spokojeni.

Váš

Dodavatel

Středisko Praha
Ronkova 13/353
180 00 Praha 8
tel: 266 313 652
fax: 266 313 652-11

Středisko Opava
Pivovarská 7/71
746 01 Opava
tel/fax: 553 775 226

Středisko České Budějovice
Staroměstská 2608
370 04 České Budějovice
tel/fax: 387 432 502

Středisko Brno
Minská 100
616 00 Brno
tel/fax: 541 240 393

① Dodavatel ujišťuje spotřebitele, že na tento výrobek bylo vystaveno prohlášení o shodě.

Návod ze dne 4.12.2023

Verze 01.23

