

KÓD VÝROBKU	VÝROBEK
09 147 7744	Pouze sedačka
09 135 6062	Sedačka se zádovou opěrkou

Následující příručka obsahuje popisy týkající se montáže, obsluhy a péče o závěsnou sedačku na vanu Homecraft White Line. Před použitím pomůcky se poraďte se svým lékařem a ujistěte se, že je to pro vás vhodná pomoc. Pokud máte další dotazy týkající se této sedačky na vanu, kontaktujte svého dodavatele.

## Používejte v souladu s požadavky

Sedačky na vanu White Line nabízejí možnost sezení pro osoby s omezenou pohyblivostí, ale s dostatečnou schopností sedět, a možnost provádět každodenní osobní hygienu ve vaně.

Sedačka na vanu umožňuje použít vanu, aniž byste se museli zcela posadit na dno vany.

Možné podmínky nebo výsledky zranění jsou např.:

- **Sedačka na vanu bez zádové opěrky:**  
Výrazně snížená funkce / chybějící funkce dolních končetin (např. amputace, ochrnutí, onemocnění kloubů), zatímco kontrola horní části těla a funkce horních končetin je stále dostatečná.
- **Sedačka na vanu se zádovou opěrkou**  
Výrazně snížená funkce / chybějící funkce dolních končetin (např. amputace, ochrnutí, onemocnění kloubů), zatímco kontrola horní části těla a funkce horních končetin je stále dostatečná.

Sedačky na vanu jsou určeny pouze pro použití ve standardních vanách. Závěsná sedačka na vanu White Line se smí používat pouze ve vanách, ve kterých je zajištěna bezpečná poloha sedačky. Smí se používat pouze po úplném smontování.

## Bezpečnost - Obecné poznámky

Před zahájením montáže si prosím pečlivě přečtěte pokyny k montáži! Nepoužívejte sedačku na vanu, pokud při používání zjistíte závady.

Prosím dbejte na to, aby:

- si návod přečetli všichni jednotlivci, kteří budou sedačku na vanu používat.
- měli všichni jednotlivci, kteří používají sedačku na vanu, přístup k tomuto návodu.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu.

### Omezení použití!

- Pacienti vážící více než 130 kg nesmějí používat závěsnou sedačku na vanu White Line.



Maximální hmotnost uživatele



## Riziko úrazu!

- Sedačky na vanu používejte pouze k zamýšlenému použití. Nejedná se o náhradu za žebřík a nejedná se o cvičební pomůcku ani hračku.
- Sedačky na vanu nejsou určeny k použití během vyšetření nebo ošetření.
- Sedačky na vany používejte pouze pokud jsou v technicky dokonalém stavu.
- Používejte pouze náhradní díly a příslušenství schválené společností Performance Health International Ltd.
- Neprovádějte strukturální změny, které nebyly schváleny výrobcem.
- Sedačky na vanu se nesmí používat v prostředí, kde lze očekávat výskyt hořlavých plynů nebo pár (např. z anestetik).
- Před použitím se ujistěte, že sedačka bezpečně sedí na okraji vany.

## Poznámky k montáži sedaček na vanu

### Nebezpečí zranění v důsledku nesprávné montáže!

- Po montáži zkontrolujte správnou polohu a pevnou podporu všech součástí.

### Nebezpečí zranění!

- Používejte pouze nástroje vhodné pro danou práci.
- Provádějte práci, pouze pokud jste obeznámeni s používáním daných nástrojů.

**Návod k použití je k dispozici i ve verzi s velkými znaky. Pokud tuto verzi požadujete, obraťte se prosím na zákaznické středisko Performance Health, kde vám zajistí výtisk.**

**Tento návod prosím uschovejte pro budoucí použití.**

**Vyrobeno pro:**  
**Performance Health International Ltd.**  
H Nunn Brook Road, Huthwaite, Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire, NG17 2HU, UK.

**UK:**

Tel: 03448 730 035

Fax: 03448 730 100

www.performancehealth.co.uk

**Mezinárodní:**

Tel: +44 1623 448 706

Fax: +44 1623 448 784

**Performance Health Supply, Inc.**

W68 N158 Evergreen Blvd.

Cedarburg, WI 53012

USA

www.performancehealth.com

**Performance Health ANZ**

Unit 3, 3 Basalt Road,

Pemulwuy NSW, Austrálie 2145.

Tel: 1300 473 422

Fax: 1300 766 473

**Performance Health France**

13 rue Andre Pingat

CS 10045

51724 Reims Cedex

Francie

Tel: 00(33) 03 10 00 79 30

Fax: 00(33) 03 54 70 04 34

www.performancehealth.fr

## Obsah

Sedačky na vanu jsou balena v kartonech. Před zahájením montáže zkontrolujte obsah balení na základě následujícího seznamu. V případě zjevných závad nebo chybějících součástí kontaktujte obchod se zdravotními pomůckami.

2 x konzola podle modelu

(1) pro sedačku na vanu bez zádové opěrky

(2) pro sedačku na vanu se zádovou opěrkou

(s přídatným otvorem)

1 x (3) sedák

1 x (4) zádová opěrka

6 x (5) krytky

6 x (6) imbusový šroub (M8 x 50 mm)

6 x (7) plastové disky

6 x (8) kovová podložka

6 x (9) podložka s plochou otočenou drážkou (detailní foto a)

12 x (10) gumová těsnící podložka

6 x (11) podložka s hluboko otočenou drážkou (detailní foto b)

1 x (12) imbusový klíč

## Příprava

Všechny upevňovací šrouby připravte následujícím způsobem:

(6) Imbusový šroub s

(7) plastový disk

**POZNÁMKA** Dbejte na to, aby lisovaná hrana (a) plastového disku (7) směřovala k hlavě šroubu (viz detailní foto).

(8) kovová podložka,

(9) podložka s plochou otočenou drážkou a

(10) gumová těsnící podložka

## Montáž

Připravené upevňovací šrouby zasuňte do otvorů v konzole (1) a zajistěte zatlačením na gumovou těsnící podložku (2).

**POZNÁMKA** Upevňovací šrouby musí být zasunuty na straně odvrácené od pryžových krytů.

**Jen pro sedačku na vanu se zádovou opěrkou:**


Na horní upevňovací šroub nasadíte podložku s hluboko otočenou drážkou (3) a našroubujte zádovou opěrku (4).

**POZNÁMKA** Pro snadnější montáž nejprve našroubujte všechny upevňovací šrouby až na doraz a neutahujte je.

Na horní upevňovací šrouby vložte podložku s hluboko otočenou drážkou (5).

Našroubujte sedačku k bočnímu panelu.

**U sedačky se zádovou opěrkou** musí nepřerušovaná strana směřovat k zádové opěrce.

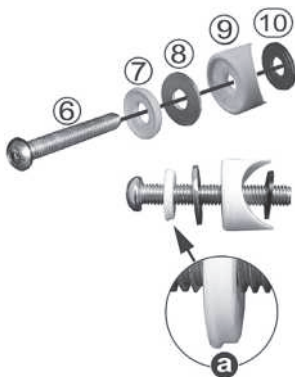

Připravené upevňovací šrouby zasuňte do otvorů v druhém bočním panelu (6) a zajistěte zatlačením gumové těsnící podložky (7).

**POZNÁMKA** Upevňovací šrouby musí být zasunuty na straně odvrácené od pryžových krytů.

Podložku s hluboko otočenou drážkou nasadíte na trubky zašroubovaného rámu sedáku (8).

Přišroubujte boční panel k rámu sedáku a zádové opěrky.

Utáhněte všech šest upevňovacích šroubů.

**POZNÁMKA** Přílišné utážení vede ke zničení závitových vložek.

Zatlačte všechny krytky na plastové disky (9).



## Přípevnění sedačky k vaně


Sedačku na vanu používejte pouze ve vanách, u kterých je zajištěna bezpečná podpora pryžových krytek (1). Alespoň 2/3 šířky (B) všech čtyř gumových krytek (1) musí být podepřeno na okraji vany (2).



**a (šířka podpory) = min. 2/3 B (šířka gumové krytky)**

## Riziko úrazu!

- Před použitím se ujistěte, že sedačka bezpečně sedí na okraji vany.

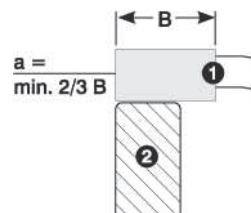

## Čištění

- Malé skvrny a prach lze nejlépe odstranit vlhkými ubrousky.
- Větší skvrny lze odstranit pomocí neabrazivních, jemných čistících prostředků.
- K čištění nepoužívejte nástroje s ostrými hranami (nože, kovové škrabky) nebo agresivní rozpouštědla.

## Údržba

Sedačky na vanu jsou bezúdržbové, je však třeba je kontrolovat jednou měsíčně.

## Proveďte následující testy:

- Vizuální kontrola deformace, poškození, opotřebení a koroze všech součástí.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny spoje (matice, šrouby atd.) úplné, funkční a dokonale padnou.

Sedačku nepoužívejte, pokud během používání zjistíte závady.

## Likvidace

Sedačky na vanu se skládají z kovových a plastových částí. Likvidace jednotlivých materiálů musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí a likvidace.

## Záruka

Performance Health International Ltd poskytuje 24 měsíční záruku na dokonalou kvalitu v rámci svých všeobecných obchodních podmínek.