

# ORTOSERVIS

Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8,  
tel: 266 313 652, fax: 266 313 652-11



VITA MAXIMA



## CHODÍTKO PLATFORM S PLYNOVÝM PÍSTEM

Návod k použití

## POPIS CHODÍTKA

Chodítka je zdravotní pomůcka určená pro nácvik chůze, k rehabilitaci dolních končetin a jako pomocník při chůzi osob se sníženou pohyblivostí. Chodítka je tvořeno velmi stabilní duralovou lakovanou konstrukcí s čtyřmi kolečky. Je vybaveno předloketními opěrami (deskou), o kterou se uživatel může opřít a dále madly pro ruce. Předloketní opora je výškově nastavitelná s pomocí plynové pružiny s možností pevné aretace. Jednotlivé části předloketní opory jsou samostatně nastavitelné do šířky, lze tak vytvořit i asymetrický prostor pro trup o šíři 32 až 48 cm. Přední madla pro ruce jsou délkově nastavitelná a lze nastavit i jejich sklon. Madla jsou doplněna ovládacími pákami zadních brzd s lehkým chodem. Zadní brzdy lze aretovat v zabrzděné poloze, například při použití chodítka jako opory při vstávání. Brzdy lze také používat jako dopomoc při změně směru chůze. Chodítka je určeno pro vnitřní užití, nesmí být používáno na šikmých plochách, jejichž sklon přesahuje  $3,5^\circ$  (na rampách a schodištích). Chodítka není určeno k přepravě nepohyblivých osob nebo nákladů.



## MONTÁŽ CHODÍTKA

Chodítka je dodáváno většinou sestavené, případně v kartonu rozložené pro lepší transportovatelnost. Pro sestavení chodítka přikládáme obrázkový návod, pomocí kterého budete schopni chodítka během krátké doby sestavit. Vždy zkontrolujte pevné dotažení všech šroubů a upevňovacích prvků.

## NASTAVENÍ CHODÍTKA

**Nastavení výšky předloketních opěr:** Uvolněte plastové kličky na obou podpěrných sloupech chodítka. Uvolněte páčku aretace výšky (v horní části plynové pružiny). Nastavte požadovanou výšku předloketních opor tím, že zatlačíte směrem dolů, nebo nechte samovolně vystoupat nahoru. V požadované poloze zacvakněte páčku aretace výšky směrem dolů a poté dotáhněte kličky na obou podpěrných sloupech chodítka. Správná výška předloketních opor by měla být ve výši loktů u stojící osoby s rukama volně spuštěnými podél těla.

## Nastavení šířky předloketních opěr:

Uvolněte šrouby umístěné pod předloketní oporou v oblasti lokte. Nastavte úhel předloketní opory vysunutím směrem ven či dovnitř a opět utáhněte šrouby na obou stranách.

## Nastavení vzdálenosti a úhlu tlačných madel:


Uvolněte páčky umístěné pod tlačnými madly, nastavte vzdálenost a úhel tak, aby byla madla snadno uchopitelná v příjemné poloze a opět dotáhněte aretační páčky.



## POUŽITÍ BRZD

Pro přibrzdování při chůzi jednoduše přitáhněte páky brzd směrem dozadu k tlačným madlům. Pokud chcete pokračovat v chůzi, páky uvolněte.

Pokud chcete použít brzdy na tlačných madlech k zabrzdění chodítka (tedy vždy když budete do chodítka vstupovat, nebo z něj vystupovat), odtlačte páky brzd směrem dopředu, až uslyšíte cvaknutí. K odbrzdění pak přitáhněte páky k tlačným madlům, až ucítíte uvolnění brzd. Chodítko je vybaveno brzdami jednotlivých koleček. K zabrzdění sešlápněte pedálek na každé brzdě. K odbrzdění použijte horní pedálek, který vyskočí po zabrzdění chodítka... opět sešlápněte, až se kolečko odbrzdí.

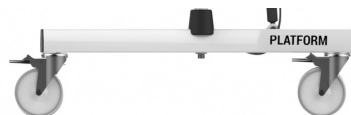

## ÚDRŽBA CHODÍTKA

Chodítko musí být skladováno v suchém a čistém prostředí bez vlivu chemických látek. Všechny díly chodítka udržujte čisté a suché. Vhodné je občas přešetřit díly suchým hadrem. Při větším znečištění je nutné díly otřít vlhkým hadrem a ihned pečlivě vytřít do sucha. Při čistění používejte obvyklé čisticí prostředky (saponáty) v návodem stanovené koncentraci.

## ZÁRUKA A OPRAVY

Na chodítko je poskytována záruka 2 roky na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a vady vzniklé nesprávným používáním. Se záručními a ale i s pozáručními opravami se vždy obraťte z důvodu zachování záruky pouze na naše odborná pracoviště na níže uvedených adresách. Věříme, že Vám chodítko ulehčí Vaši situaci a že s ním budete spokojeni.

Váš

Dodavatel

**Ortoservis s.r.o., sídlo ul. Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8**

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 72014, IČO: 26121760, DIČ: CZ26121760

**SERVISNÍ STŘEDISKA ORTOSERVIS - VITA MAXIMA**

Středisko Praha  
Ronkova 13/353  
180 00 Praha 8  
tel: 266 313 652  
fax: 266 313 652-11

Středisko Opava  
Pivovarská 71/7  
746 01 Opava  
tel/fax: 553 775 226

Středisko České Budějovice  
Staroměstská 2608  
370 04 České Budějovice  
tel/fax: 387 432 502

Středisko Brno  
Minská 100  
616 00 Brno  
tel/fax: 541 240 393



Dodavatel ujišťuje spotřebitele, že na tento výrobek bylo vystaveno prohlášení o shodě.

Návod ze dne 05/2017  
Verze 1/017