



Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)

Kód výrobku: 2245 A 2245A

Výrobek:



Zobrazený model: 2245A

SPECIFIKACE

Hloubka: 69 cm

Šířka: 54 cm

Výška: 73–93 cm

Hmotnost výrobku: 6 kg

Max. hmotnost uživatele: 125 kg

POPIS

Chromované ocelové chodítko s volitelnými výškově nastavitelnými rukojetěmi. Dvě přední kolečka umožňují tlačení rámu dopředu. Lze je složit, a tak jednoduše skladovat. Stačí stisknout pružinová tlačítka, která se nalézají nahoře na rámových sloupcích.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Tento výrobek je navržen jako pomůcka pro osoby s omezenou pohyblivostí / pohybovou schopností v důsledku dlouhodobé nemoci nebo zotavování se po poranění či nemoci.

Chodítko je určeno jako pomůcka pro uživatele, kterým poskytuje oporu při chůzi, nejsou-li schopni používat tradiční chodítko. Je navrženo tak, aby uživatel mohl chodit v co nejvzpřímenější pozici.

NÁVOD K POUŽITÍ

Díky kolečkům lze pomůcku tlačit při použití dopředu. Doporučujeme, abyste s kvalifikovanou osobou, jako je váš dodavatel nebo zdravotnický pracovník, konzultovali vhodnost chodítka pro vaše potřeby. Mohou vám také pomoci nastavit rukojeti na správnou výšku a ukázat správné použití chodítka.

Uživatel musí stát v mezích půdorysu rámu a posouvat jím dopředu, dokud nebudou zadní nohy ve stejné rovině jako chodidla uživatele. Uživatel se pak může posunout dopředu a proces zopakovat. Je možné, že bude potřebná pomoc pečovatele, a to podle úrovně schopností pacienta.

NASTAVENÍ

Nastavte výšku uvolněním šroubových úchytů na obou rukojetích, přemístěním do správné výšky a opětovným utažením v požadované poloze. Před použitím zkontrolujte, zda jsou oba šrouby dotaženy a nastaveny na stejnou výšku.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB, UK

Company Registration No. 1869285

Website: www.romamedical.co.uk

Email: sales@romamedical.co.uk

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Uživatel musí být dostatečně silný, aby tlačil pomůcku dopředu a udržoval rovnováhu.

Vhodné pouze pro použití v interiéru a na rovných plochách. Buďte opatrní, když se pohybujete po nakloněné ploše. Před použitím se vždy se ujistěte, že je chodítko vyrovnané a vyvážené.

Nepokoušejte se chodítko používat na schodech ani na eskalátorech.

Nepokoušejte se překonat obrubníky nebo překážky bez patřičné asistence.

Na rámu nepřenašejte tašky ani ostatní předměty. Před použitím se ubezpečte, zda jsou všechny upevňovací prvky zajištěné a zda není konstrukce chodítka vystavena nadměrnému ohybu nebo pohybu.

Otočná kolečka se musejí volně otáčet.

Pokud se některý upevňovací prvek uvolní, přestaňte chodítko používat.

ČIŠTĚNÍ

K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy rukojeti očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným kluzkým povrchem.

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU

Rám výrobku (kromě kol nebo úchytů na berle) je dodáván se zárukou 24 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím.

Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.

PROBLÉMY/OTÁZKY

Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem.

Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na chodítku.