



Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)
Kód výrobku: 4228 a 4228W (montáž na stěnu)
Výrobek: Vanová deska pro vysokou zátěž Bexley



SPECIFIKACE



Zobrazený model: 4228

Hloubka: 31 cm
Šířka: 69 cm

Hmotnost výrobku: 3,6 kg
Max. hmotnost uživatele: 200 kg



Zobrazený model: 4228W

Hloubka: 30 cm
Šířka: 70 cm

Hmotnost výrobku: 3,8 kg
Max. hmotnost uživatele: 190 kg

POPIS

Výrobek se skládá z perforované ocelové desky potažené plastem s nastavitelnými podložkami. Deska bude bezpečně spočívat na horní části vany, což uživateli umožní pohodlně sedět nad vanou při koupání nebo sprchování. Nastavitelné podložky jsou umístěny pod deskou, takže je možné provést úpravy tak, aby vyhovovaly jemným odchylkám v šířce vany. Kromě toho tyto podložky zabraňují sklouznutí desky z vany

Výrobek 4228W se skládá z perforované desky potažené plastem s deskou pro trvalé připevnění ke zdi vedle vany. Pokud se deska nepoužívá, můžete ji sklopit ke zdi.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Uživatelé mohou sedět na desce s nohama umístěnými ve vaně, díky čemuž není nutné sedět nízko ve vaně a usnadňuje se následné zvedání.

NÁVOD K POUŽITÍ A NASTAVENÍ

Zapřete se pažemi i nohama a posuňte se dolů na vanovou desku. Posadte se na sedátko a umyjte se. Po ukončení mytí, než vylezete z vany, nechte z ní vytéct vodu.

4228 - Chcete-li nastavit podložku na správnou šířku dle vany, uvolněte ruční knoflík, upravte podložky na požadovanou šířku, aby se sedátko vešlo do vany, a znovu utáhněte ruční knoflíky.

4228W - Toto zařízení musí být osazeno na nosnou zeď. Montáž provede způsobilá osoba. Upevnění provedte pomocí hmoždinek.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: www.romamedical.co.uk

Email: sales@romamedical.co.uk

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499



Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na desce.

Nemůžeme doporučit, jaké upevnění na zdi použít, protože to bude záviset na konstrukci vaší zdi, vyžádejte si radu od kvalifikované osoby, tj. stavitele.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Na zařízení nestůjte!

Při použití buďte opatrní, protože některé koupelnové výrobky mohou učinit povrchy kluzkými.

ČIŠTĚNÍ

K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy desku očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným kluzkým povrchem.

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU

Výrobek je dodáván s 12 měsíční zárukou. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím.

Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.

PROBLÉMY/OTÁZKY

Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem.