

Vstávání:

1. Sedněte napevně židli s rovným opěradlem, vysokým sedátkem a opěradly na ruce. Doporučujeme vyhýbat se nízkým, příliš měkkým křeslům.
2. Chodítko přiblížte co nejvíce k židli nebo křeslu tak, abyste dosáhli na madla chodítka. [3]
3. Při vstávání se zapřete pomocí chodítka madel pro vstávání [3] a postavte se stabilně oběma nohama na zem.
4. Před použitím chodítka k chůzi, uchopte madla chodítka určené pro chůzi. [2]



Chodítko vstávací

NÁVOD K OBSLUZE



Bezpečnostní upozornění

- ▶ Před používáním chodítka si pečlivě přečtěte návod k použití.
- ▶ Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.
- ▶ Pokud se otáčíte, dělejte malé kroky a vždy stůjte tak, aby Vaše boky byly rovnoběžně s přední trubkou chodítka.
- ▶ Vyhněte se vytáčení těla z chodítka, chodítko by se mohlo překloupit a způsobit zranění.
- ▶ Nenahýbejte se dopředu přes chodítko.
- ▶ **Nedoporučujeme používat chodítko na eskalátoru nebo schodech.**

Údržba

Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebované pryžové nástavce.

Záruka

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebování, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.



Distributor: **SENIOR VIA s.r.o.**

Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, www.seniorvia.cz

Dovozce: MCK TRADE LTD, Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3



SV032139U

